

Manuale di Istruzioni



SCHILLER


The Art of Diagnostics

Scan the QR code to
find the instructions
in your language





https://multix-trolley.com/ifu/a1z_schiller/

! Gli accessori montati sulla
colonna devono essere assemblati
prima del pole monitor
o
il pole monitor dovrà essere
rimosso prima di aggiungere gli
accessori.

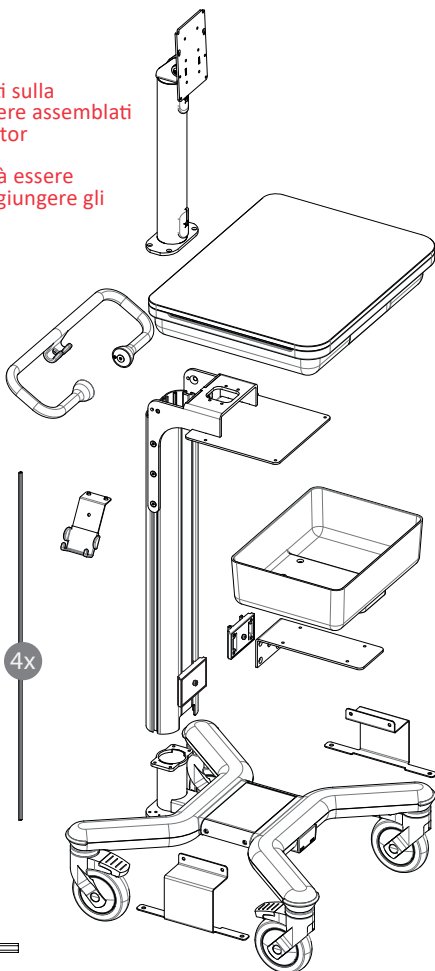



4x

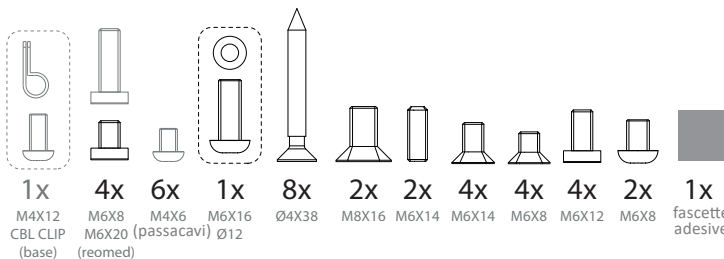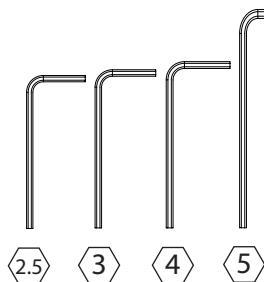




1x
M4X12
CBL CLIP
(base)

Se necessario,
utilizzare uno dei
filetti M4 evidenziati
per montare la clip e
tenere in posizione
il cavo del PSU

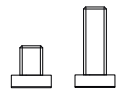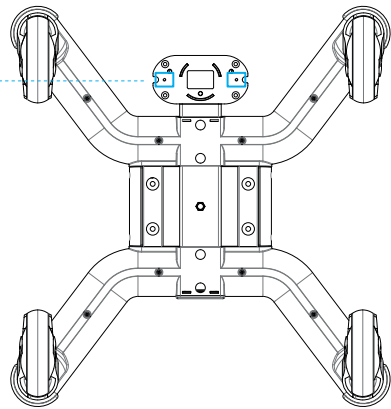


4x M6X8
4x M6X20
(reamed)

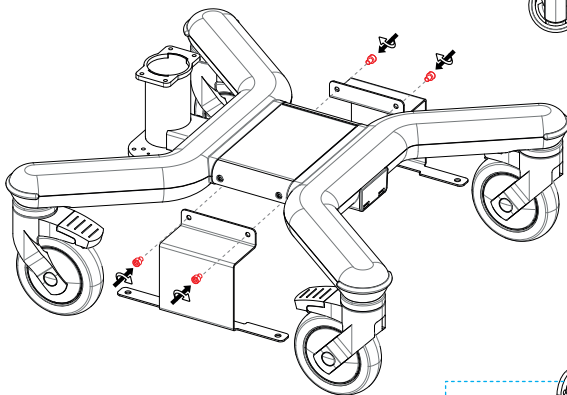



6x




Se necessario,
utilizzare la M4X6
per fissare i passacavi
alla colonna e al
supporto console

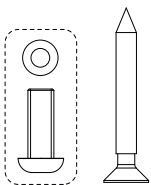


1x M6X16
Ø12
4x Ø4X38

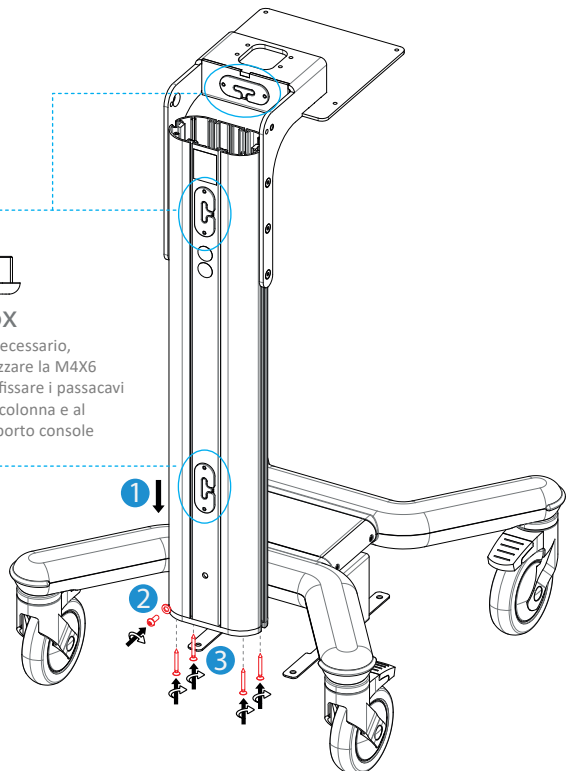

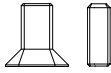

 2x 2x
 M8X16 M6X14

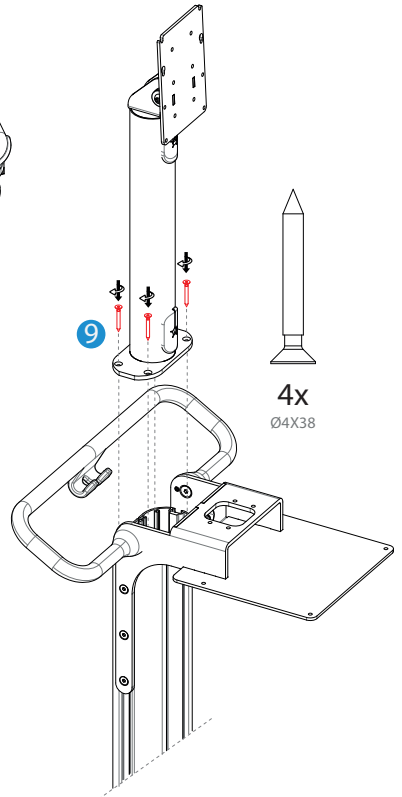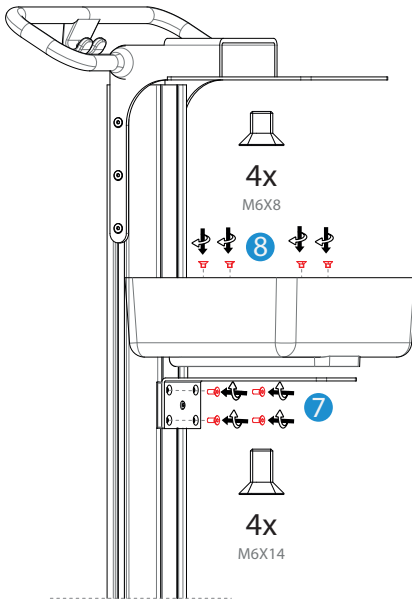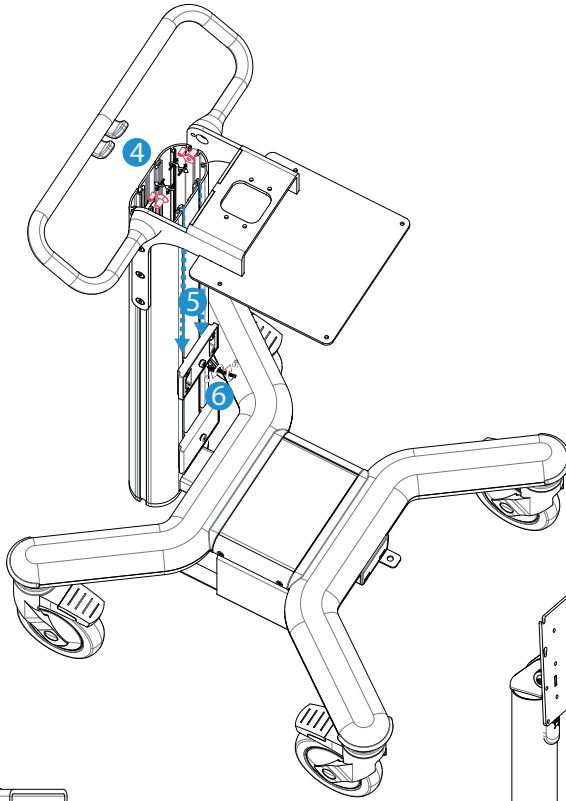

Usare la fascetta bi-adesiva per collegare l'interruttore

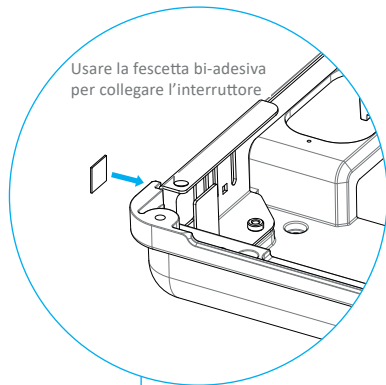


4x
M6X12

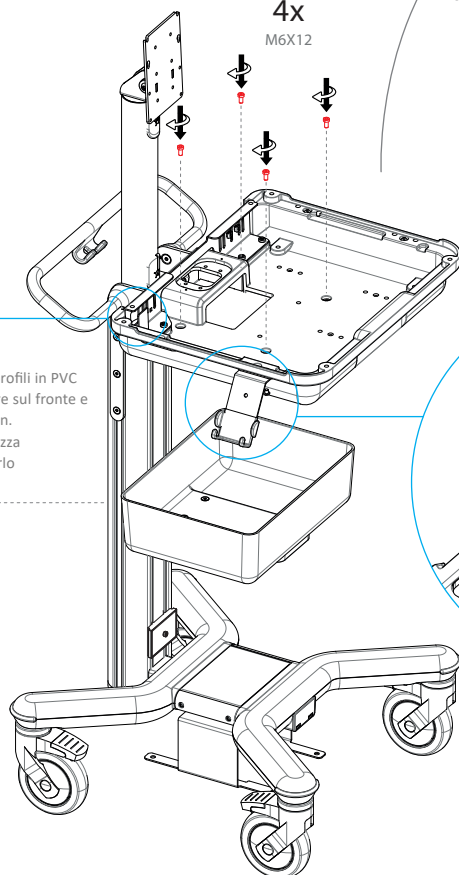


Se necessario, utilizzare i quattro profili in PVC per coprire le fessure sul fronte e sul retro della colonna. Tagliarlo alla lunghezza desiderata e spingerlo all'interno.

4x

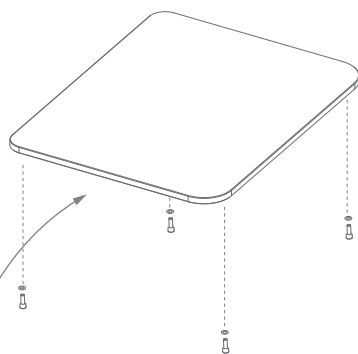

2x
M6X8

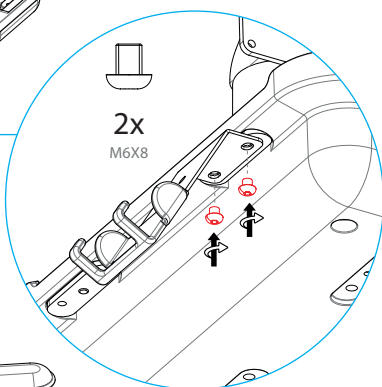

DESTINAZIONE D'USO

Il **Trolley X4** permette il trasporto del dispositivo **SCHILLER ECG device** e dei suoi accessori tra più siti di terapia all'interno di ambienti ospedalieri e strutture di cura.

OBBLIGHI GENERALI DI SICUREZZA



- Il manuale di istruzioni deve essere letto prima dell'utilizzo del trolley.
- Il manuale di istruzioni va conservato per il futuro.
- Il prodotto è stato creato esclusivamente per i fini descritti nel manuale di istruzioni.
- Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto è da considerarsi improprio.
- Multix Solutions non è responsabile per danni a persone e/o cose dovuti a un uso improprio del trolley.
- Manomissioni o danni causati da un uso improprio portano a una cessazione dell'accordo di garanzia.
- una volta montato il device **SCHILLER ECG device** sul trolley, sarà responsabilità di **SCHILLER** garantire che il sistema rispetti gli standard descritti dalla normativa EN 60601-1 nella versione attuale.

AVVERTENZE E ATTENZIONE GENERALI

La sicurezza del trolley è garantita seguendo attentamente le istruzioni elencate di seguito.

1. Assicurarsi che il trolley sia lo stesso presente sulle illustrazioni del manuale.
 - Controllare che non abbia subito danni e che non si sia rotto durante il trasporto.
 - Controllare che le parti mobili e bloccabili quali le ruote, freni e (se presente) la molla a gas siano funzionanti.
 - Tutte e quattro le ruote devono essere bloccate quando il trolley e i suoi accessori sono in fase di montaggio e quando il trolley si trova in uno stato stazionario.
 - Tutte e quattro le ruote del trolley devono essere sbloccate prima che questo venga spinto.
 - Assicurarsi che durante l'uso il trolley sia parcheggiato.
 - Assicurarsi che il trolley non venga parcheggiato su superfici fortemente irregolari.
 - In modo da prevenire il ribaltamento del trolley, la maniglia va tenuta saldamente se il trolley deve scavalcare qualunque tipo di ostacolo (es. cavo di corrente).
 - Evitare di spingere il trolley con eccesso di forza.
 - Non sono permesse modifiche di alcun tipo a questo prodotto
2. Seguire le indicazioni legate al carico massimo segnate sull'etichetta di load.
 - È PROIBITO SEDERSI SUL CARRELLO
 - È PROIBITO SPINGERE IL CARRELLO
3. L'installazione e la manutenzione vanno eseguite da personale qualificato e rispettando le istruzioni di assemblaggio.
4. Su richiesta è possibile fornire ricambi previa approvazione di **SCHILLER**.

ASSEMBLAGGIO

Le istruzioni per l'assemblaggio del trolley sono descritte con le illustrazioni [alle pagine 2, 3, 4](#).

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Controllare tutti i punti di fissaggio e i meccanismi ogni 6 mesi.
- Il prodotto è solamente adatto all'uso in ambienti interni.
- Pulire regolarmente le parti metalliche e plastiche con detersivi non corrosivi e a pH neutro e con un panno/una spugna/spazzola morbida.
- Non versare direttamente sulle superfici detersivi a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse e oleose.

SMALTIMENTO

- La vita utile del prodotto è di 10 anni. In seguito il trolley va smaltito in accordanza con le leggi in vigore nel paese di utilizzo.

SIMBOLI

I simboli seguenti sono esposti sul prodotto o all'interno del manuale di istruzioni:



Attenzione



Attenersi alle istruzioni per il funzionamento



Dispositivo medico



Limite di umidità



Tenere all'asciutto



È vietato sedersi sul trolley



Marcatura CE



Produttore



Codice lotto



Orientamento



Tenere lontano dalla luce del sole



Vietato spingere



Numero di catalogo



Numero prodotto



Data di produzione



Fragile, maneggiare con cura



Limite temperatura



Distributore

ATTENZIONE



11 kg (24 Lb) Carico massimo (pole monitor)




10 kg (22 Lb) Carico massimo (base plate)



5 kg (11 Lb) Carico massimo (basket)



Massa totale, compreso il carico di lavoro sicuro

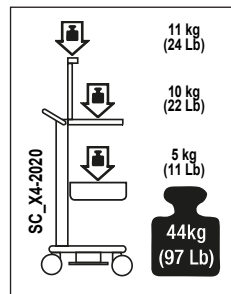


Il trolley è stato testato solo con:

* **strassle pump - DT80** montato sul fronte della colonna con **zavorra da 6kg o reomed600** sotto la base

* **strassle pump - DT100** montato sul fronte della colonna **sopra la base**

durante il trasporto del trolley, la pump-arm deve essere posizionata come da immagine sottostante:

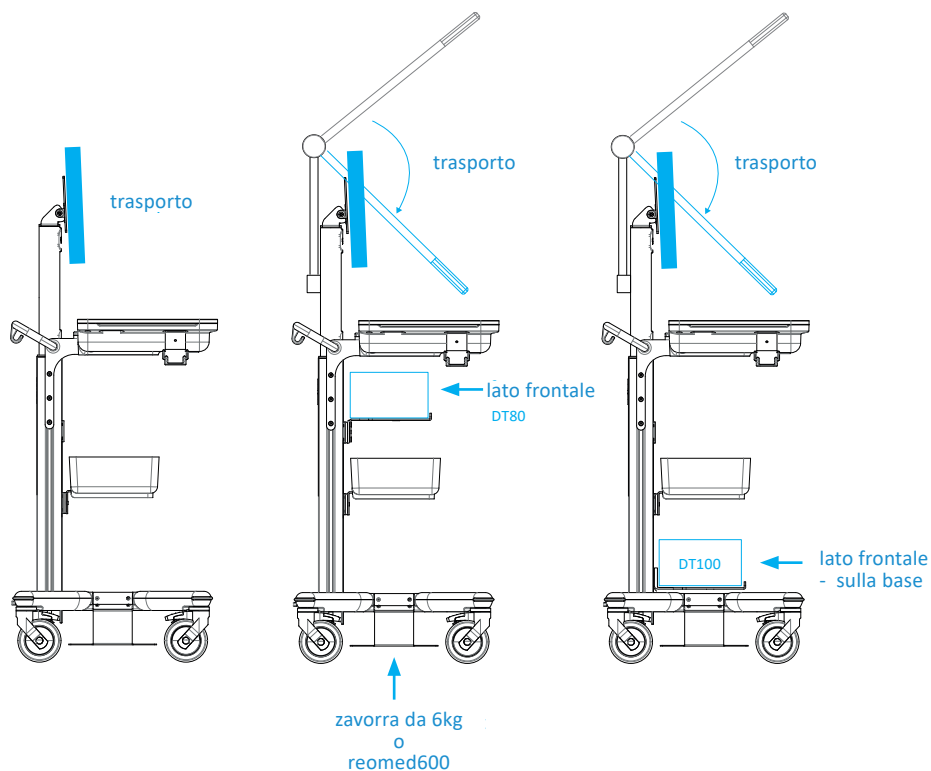

Distributo da: SCHILLER

Altgasse 68
P.O. Box 1052
6341 Baar
Switzerland
www.schiller.ch



Multix Solutions s.r.l.
Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy

