

# Guía para el montaje






**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

Scan the QR code to find the instructions in your language



[https://multix-trolley.com/ifu/at\\_z\\_schiller/](https://multix-trolley.com/ifu/at_z_schiller/)

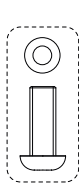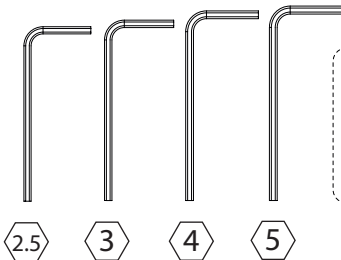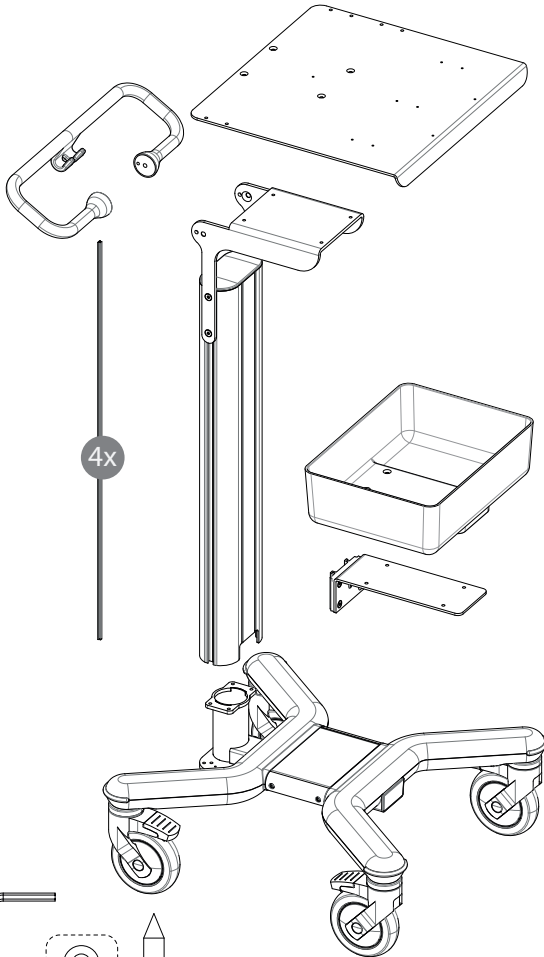

1x  
M6X16  
Ø12



4x  
Ø4X38



2x  
M8X16



2x  
M6X14



4x  
M6X10



3x  
M6X8





4x  
M4X6  
(arandelas)



1x  
M4X12  
CLIP CBL  
(base de apoyo)



4x  
M4X8  
(soporte de cable del paciente)

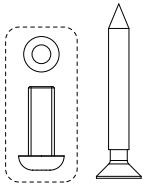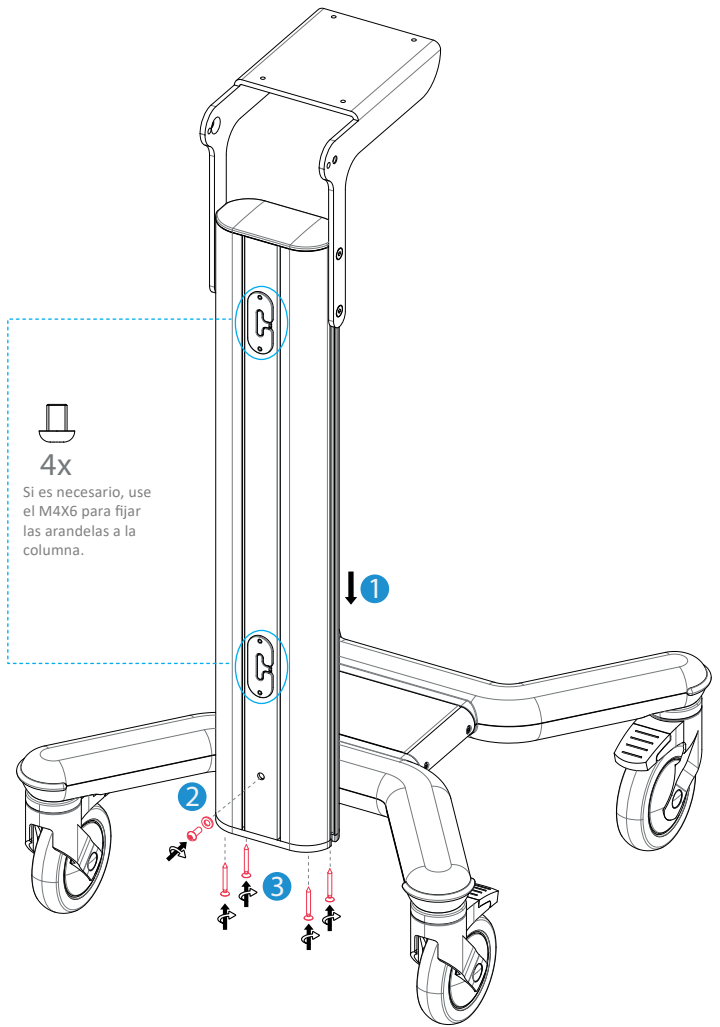


1x  
M6X16  
Ø12

4x  
Ø4X38



1x  
M4X12  
CLIP CBL  
(base de apoyo)

Si es necesario, use uno de los agujeros roscados M4 marcados para fijar el clip y sostener el cable de alimentación en su lugar.

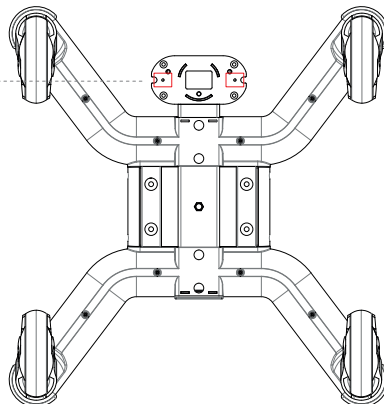



4x

M6X10




2x

M8X16



2x

M6X14

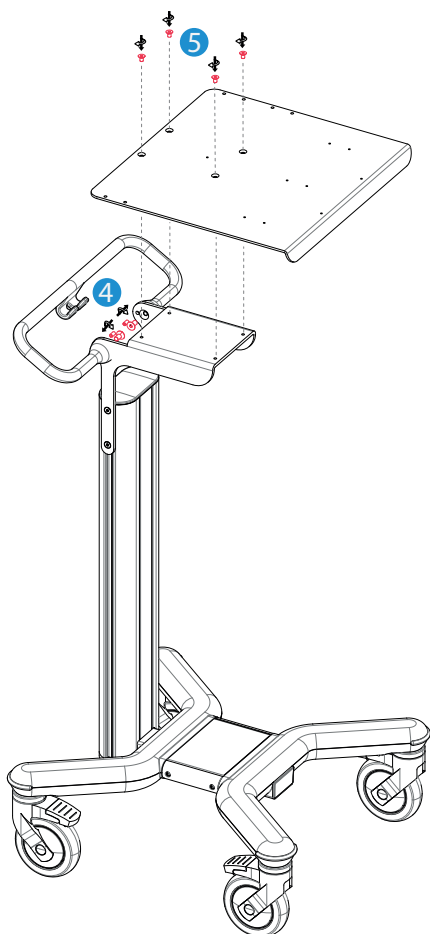


6




3x

Coloque los pernos en los agujeros  
marcados para fijar el dispositivo.

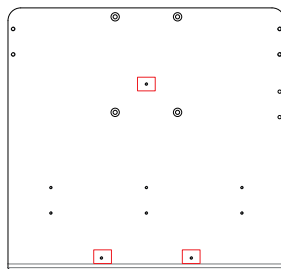




GIRE PARA FIJAR EL SOPORTE DE  
CABLE DEL PACIENTE

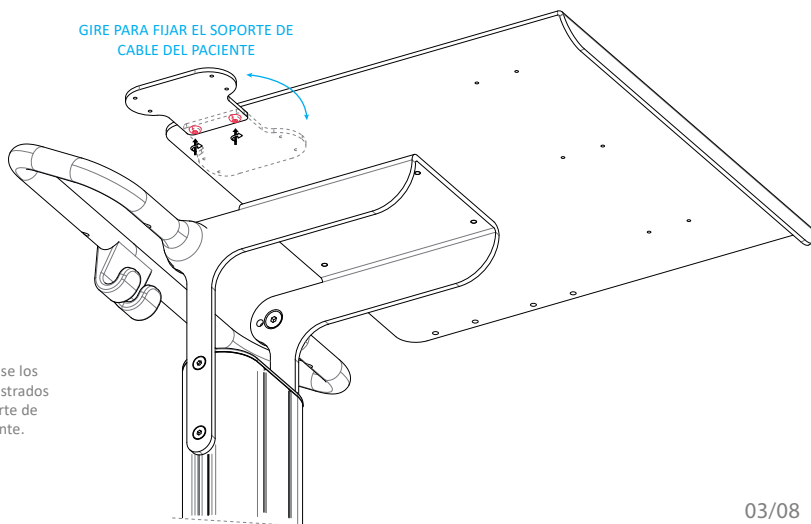

4x

M4X8

Si es necesario, use los  
tornillos (4) suministrados  
para fijar el soporte de  
cable del paciente.

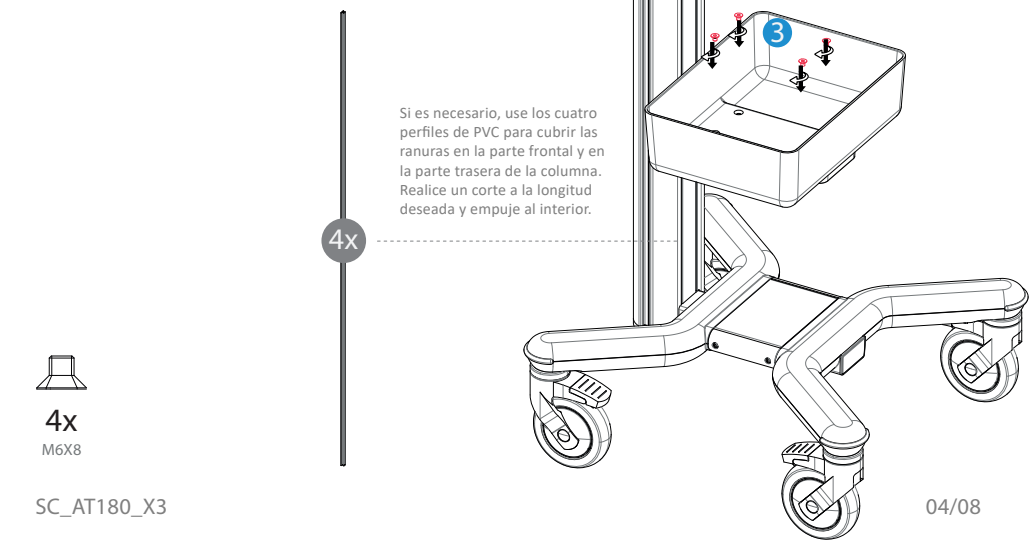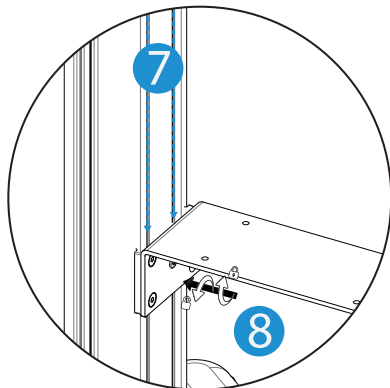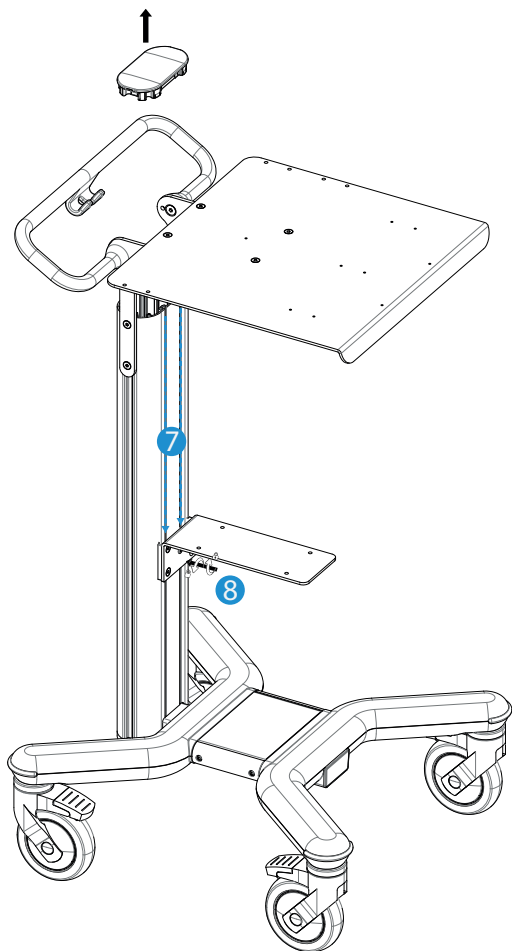

Si es necesario, use los cuatro perfiles de PVC para cubrir las ranuras en la parte frontal y en la parte trasera de la columna. Realice un corte a la longitud deseada y empuje al interior.

4x



4x  
M6X8

## USO PREVISTO

El **carro X3** permite transportar el **dispositivo ECG SCHILLER** y sus accesorios entre los puntos de terapia en entornos hospitalarios y de atención médica limitada.



### NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea el manual de instrucciones del carro antes del uso.
- Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- El producto se ha realizado exclusivamente para el uso mediante los métodos descritos en el manual de instrucciones.
- Cualquier otro uso se considera inapropiado.
- Multix Solutions no puede considerarse responsable por posibles daños a personas y/o a cosas debido a un uso inapropiado.
- Las alteraciones o daños causados al producto por un uso incorrecto comportan la pérdida de validez inmediata de la garantía.
- Cuando un **dispositivo ECG SCHILLER** está montado en el carro, es responsabilidad de **SCHILLER** asegurarse de que el sistema cumpla las normas pertinentes vigentes, EN 60601-1 versión vigente.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

**Para garantizar la seguridad del carro, respete al pie de la letra las siguientes instrucciones.**

1. Asegúrese de que el carro se corresponda con las ilustraciones del manual.
  - Revise que no haya sufrido daños durante el transporte.
  - Revise que las partes móviles y de bloqueo, como las ruedas, los frenos y (de estar presente) el muelle de gas, funcionen correctamente.
  - Las cuatro ruedas del carro deben estar bloqueadas durante el montaje del sistema y sus accesorios o cuando el sistema está estacionado.
  - Antes de empujar el carro para desplazarlo, hay que desbloquear las ruedas.
  - Asegúrese de que el carro esté estacionado.
  - Asegúrese de que el carro no se estacione en superficies con irregularidades evidentes.
  - Para evitar el vuelco del carro al superar obstáculos (por ejemplo al pasar por encima de cables), sujete la empuñadura.
  - Evite empujar el carro con demasiada fuerza.
  - No está permitido realizar modificaciones a este producto.
2. Observe la carga máxima indicada en la etiqueta de carga.
  - PROHIBIDO SENTARSE EN EL CARRO
  - PROHIBIDO EMPUJAR
3. El montaje y el mantenimiento deben estar a cargo de técnicos cualificados y llevarse a cabo siguiendo las instrucciones para el montaje.
4. Bajo petición, se pueden suministrar piezas de repuesto tras la aprobación de **SCHILLER**.

## MONTAJE

Las instrucciones de montaje del carro están ilustradas en las páginas 2, 3, 4.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Revise todos los puntos de fijación y los mecanismos cada 6 meses.
- El producto puede usarse únicamente en interiores.
- Limpie con frecuencia las superficies metálicas y/o plásticas con detergentes con pH neutro no corrosivos y un paño/esponja/cepillo de cerdas suaves.
- No vierta directamente en las superficies líquidos, detergentes a base de cloro o amoníaco, o sustancias grasosas o aceitosas.

## ELIMINACIÓN

- El carro tiene una vida útil de 10 años, tras la cual se debe eliminar conforme a las normas vigentes del país en cuestión.

## EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos se encuentran ya sea en el producto o en las instrucciones:



Precaución



Siga las instrucciones de funcionamiento



Producto sanitario



Límites de humedad



Mantener seco



Prohibido sentarse en el carro



Marca CE



Fabricante



Código de lote



Orientación



Manténgase protegido de la luz solar



Prohibido empujar



Número de catálogo



Código de Producto



Fecha de fabricación



Frágil; manipúlese con cuidado



Límites de temperatura



Distribuidor

## ADVERTENCIA




15 kg Carga máxima (placa base)  
(33 lb)



5 kg Carga máxima (cestillo portaobjetos)  
(11 lb)




Masa total, incluida la carga de trabajo segura

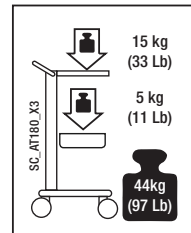

El carro se ha probado únicamente con:

- \* Bomba Strassle - DT80 montada en la columna frontal con contrapeso de 6 kg o Reomed600 bajo la base
- \* Bomba Strassle - DT100 montada en la columna frontal en la base

Durante el transporte del carro, el brazo de bombeo se debe colocar como se muestra en la siguiente imagen.

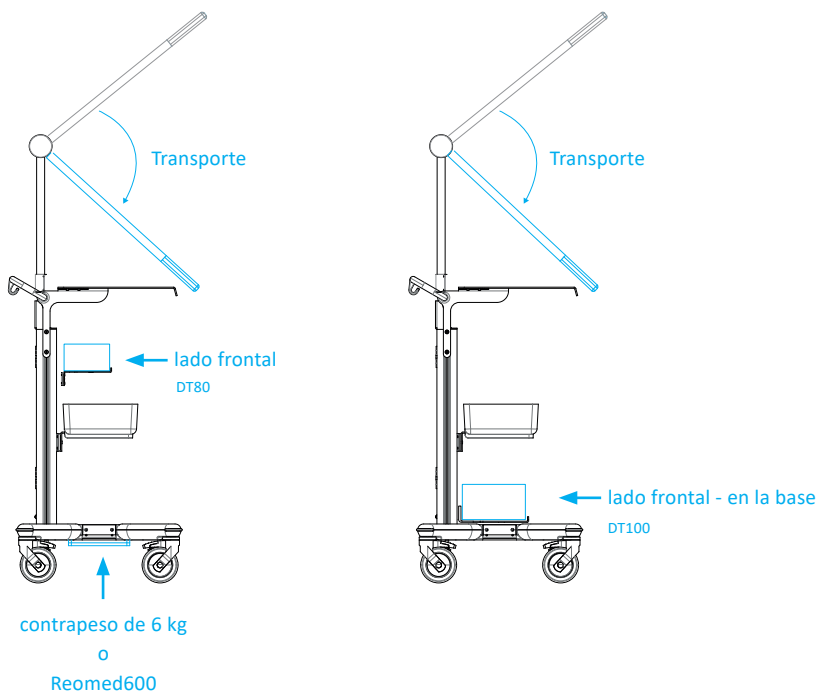

**Distribuido por:** SCHILLER

Altgasse 68

Apartado postal 1052

6341 Baar

Suiza

[www.schiller.ch](http://www.schiller.ch)



Multix Solutions s.r.l.

Via Padre Rovagnati 2

22066

Mariano Comense (CO)

Italia

