

Guía para el montaje





SCHILLER
The Art of Diagnostics

Scan the QR code to find the instructions in your language



! Los accesorios montados en la columna se deben instalar antes de conectar el monitor de barra; de lo contrario el monitor tendrá que retirarse para instalar los accesorios más adelante.

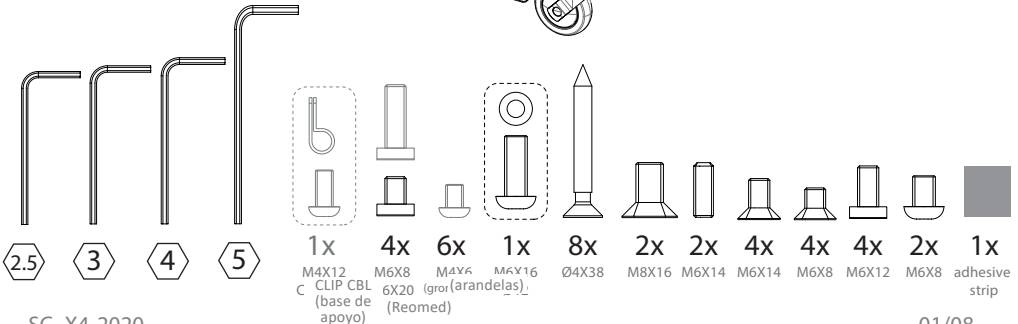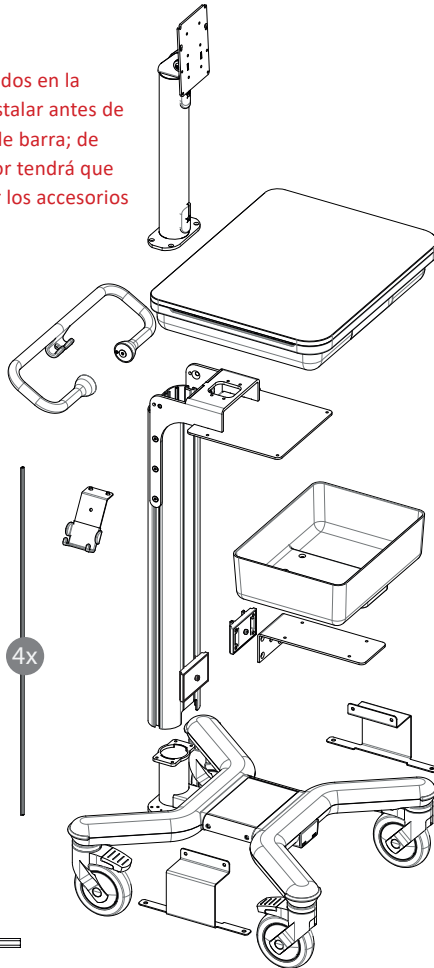



https://multix-trolley.com/ifu/a1z_schiller/



1x

M4X12
CLIP CBL
(base de apoyo)

Si es necesario, use uno de los agujeros roscados M4 marcados para fijar el clip y sostener el cable de alimentación en su lugar.

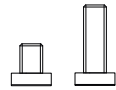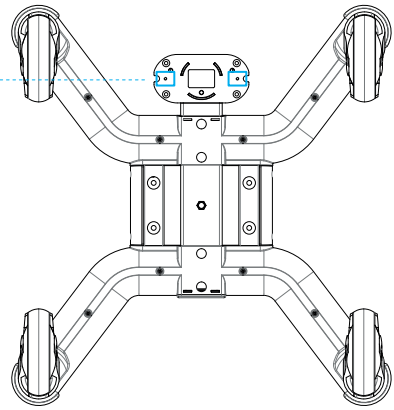


4x

M6X8


4x

M6X20
(Reamed)

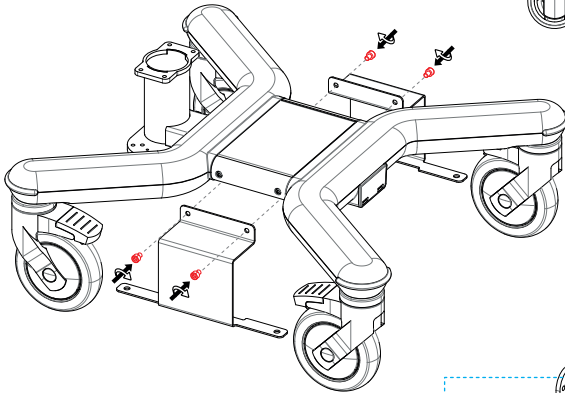

6x

Si es necesario, use el M4X6 para fijar las arandelas a la columna y al soporte de la consola.

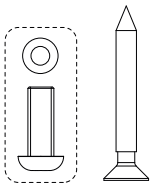



1x




M6X16
Ø12

4x


Ø4X38

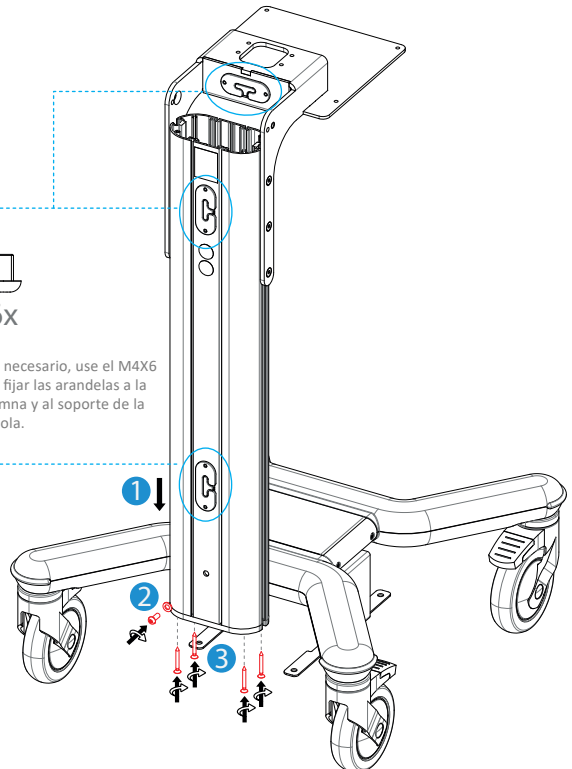

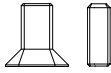

 2x 2x
 M8X16 M6X14

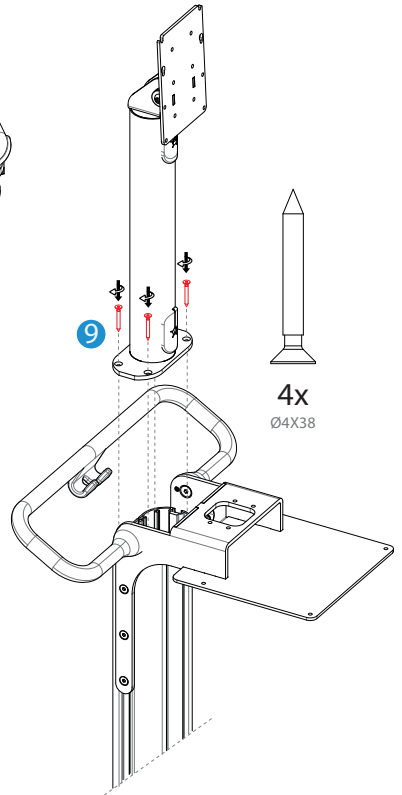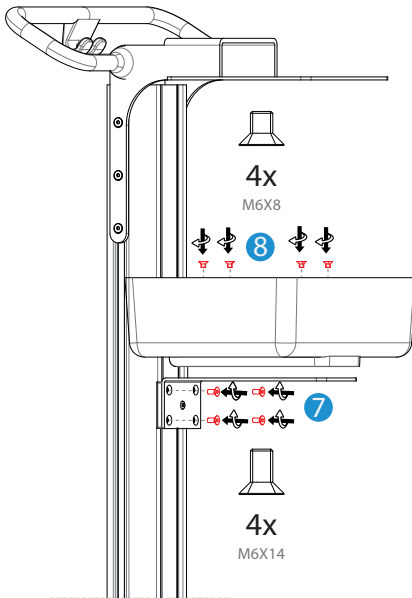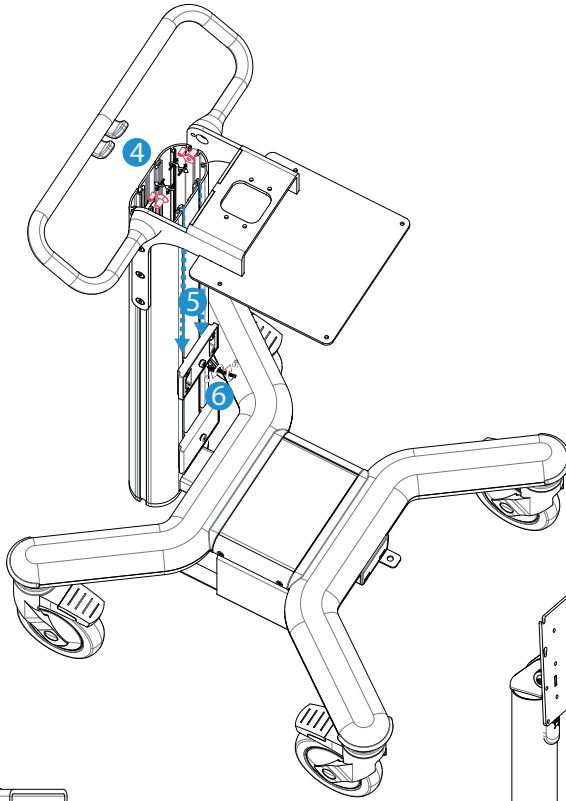

Use la tira adhesiva de doble cara para fijar el interruptor.

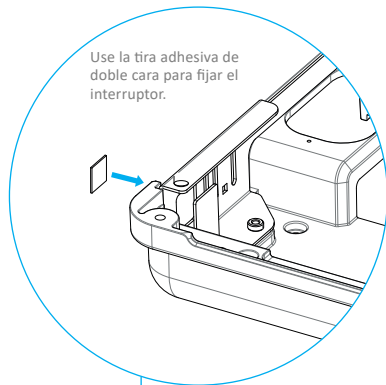

4x
M6X12

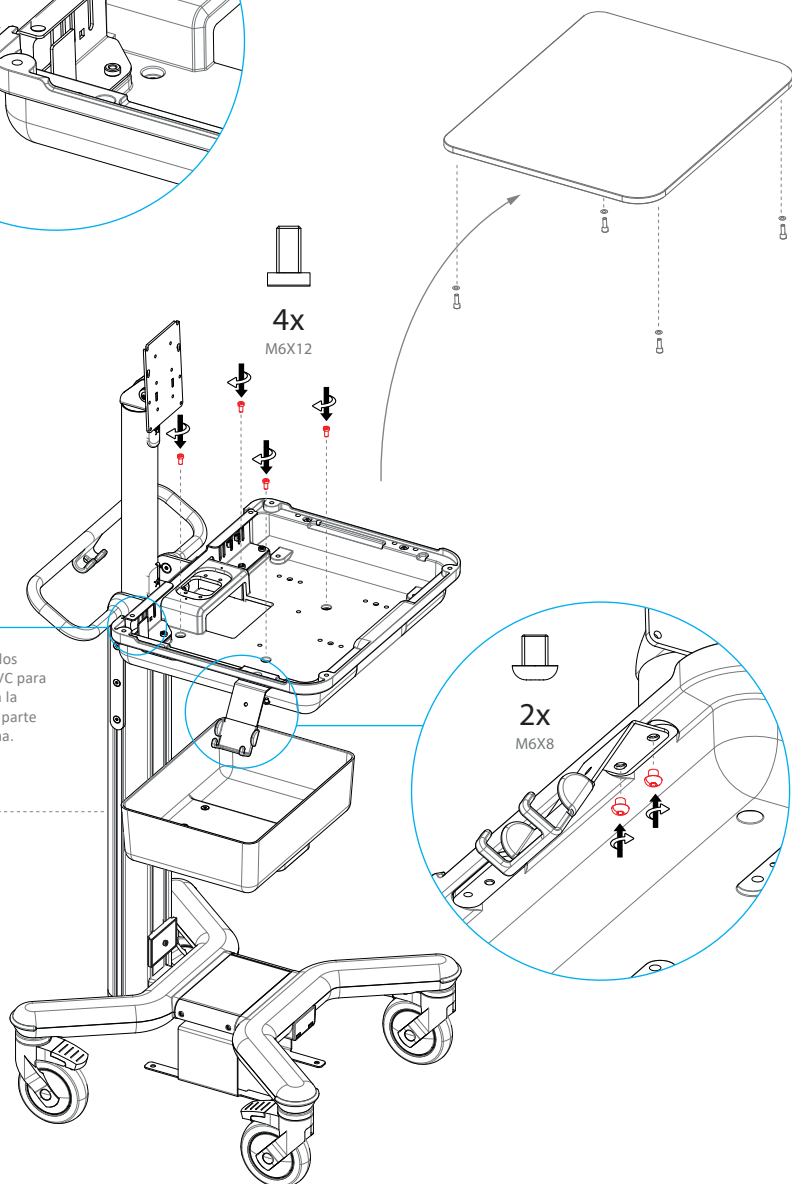

Si es necesario, use los cuatro perfiles de PVC para cubrir las ranuras en la parte frontal y en la parte trasera de la columna. Realice un corte a la longitud deseada y empuje al interior.

4x

2x
M6X8

USO PREVISTO

El carro X4 permite transportar el **dispositivo ECG SCHILLER** y sus accesorios entre los puntos de terapia en entornos hospitalarios y de atención médica limitada.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



- Lea el manual de instrucciones del carro antes del uso.
- Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- El producto se ha realizado exclusivamente para el uso mediante los métodos descritos en el manual de instrucciones.
- Cualquier otro uso se considera inapropiado.
- Multix Solutions no puede considerarse responsable por posibles daños a personas y/o a cosas debido a un uso inapropiado.
- Las alteraciones o daños causados al producto por un uso incorrecto comportan la pérdida de validez inmediata de la garantía.
- Cuando un **dispositivo ECG SCHILLER** está montado en el carro, es responsabilidad de **SCHILLER** asegurarse de que el sistema cumpla las normas pertinentes vigentes, EN 60601-1 versión vigente.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

Para garantizar la seguridad del carro, respete al pie de la letra las siguientes instrucciones.

1. Asegúrese de que el carro se corresponda con las ilustraciones del manual.
 - Revise que no haya sufrido daños durante el transporte.
 - Revise que las partes móviles y de bloqueo, como las ruedas, los frenos y (de estar presente) el muelle de gas, funcionen correctamente.
 - Las cuatro ruedas del carro deben estar bloqueadas durante el montaje del sistema y sus accesorios o cuando el sistema está estacionado.
 - Antes de empujar el carro para desplazarlo, hay que desbloquear las ruedas.
 - Asegúrese de que el carro esté estacionado.
 - Asegúrese de que el carro no se estacione en superficies con irregularidades evidentes.
 - Para evitar el vuelco del carro al superar obstáculos (por ejemplo al pasar por encima de cables), sujete la empuñadura.
 - Evite empujar el carro con demasiada fuerza.
 - No está permitido realizar modificaciones a este producto.
2. Observe la carga máxima indicada en la etiqueta de carga.
 - PROHIBIDO SENTARSE EN EL CARRO
 - PROHIBIDO EMPUJAR
3. El montaje y el mantenimiento deben estar a cargo de técnicos cualificados y llevarse a cabo siguiendo las instrucciones para el montaje.
4. Bajo petición, se pueden suministrar piezas de repuesto tras la aprobación de **SCHILLER**.

MONTAJE

Las instrucciones de montaje del carro están ilustradas [en las páginas 2, 3, 4.](#)

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Revise todos los puntos de fijación y los mecanismos cada 6 meses.
- El producto puede usarse únicamente en interiores.
- Limpie con frecuencia las superficies metálicas y/o plásticas con detergentes con pH neutro no corrosivos y un paño/esponja/cepillo de cerdas suaves.
- No vierta directamente en las superficies líquidos, detergentes a base de cloro o amoníaco, o sustancias grasosas o aceitosas.

ELIMINACIÓN

- El carro tiene una vida útil de 10 años, tras la cual se debe eliminar conforme a las normas vigentes del país en cuestión.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos se encuentran ya sea en el producto o en las instrucciones:



Precaución



Siga las instrucciones de funcionamiento



Producto sanitario



Límites de humedad



Mantener seco



Prohibido sentarse en el carro



Marca CE



Fabricante



Código de lote



Orientación



Manténgase protegido de la luz solar



Prohibido empujar



Número de catálogo



Código de Producto



Fecha de fabricación



Fragil, manipúlese con cuidado



Límites de temperatura



Distribuidor

ADVERTENCIA



11 kg (24 lb) Carga máxima (monitor de barra)




10 kg (22 lb) Carga máxima (placa base)



5 kg (11 lb) Carga máxima (cestillo portaobjetos)




Masa total, incluida la carga de trabajo segura

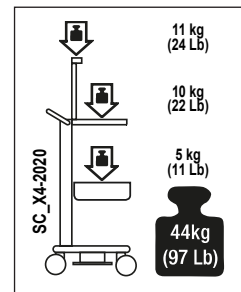

El carro se ha probado únicamente con:

- * Bomba Strassle - DT80 montada en la columna frontal con contrapeso de 6 kg o Reomed600 bajo la base
- * Bomba Strassle - DT100 montada en la columna frontal en la base

Durante el transporte del carro, el brazo de bombeo y/o el monitor se deben colocar como se muestra en la siguiente imagen.

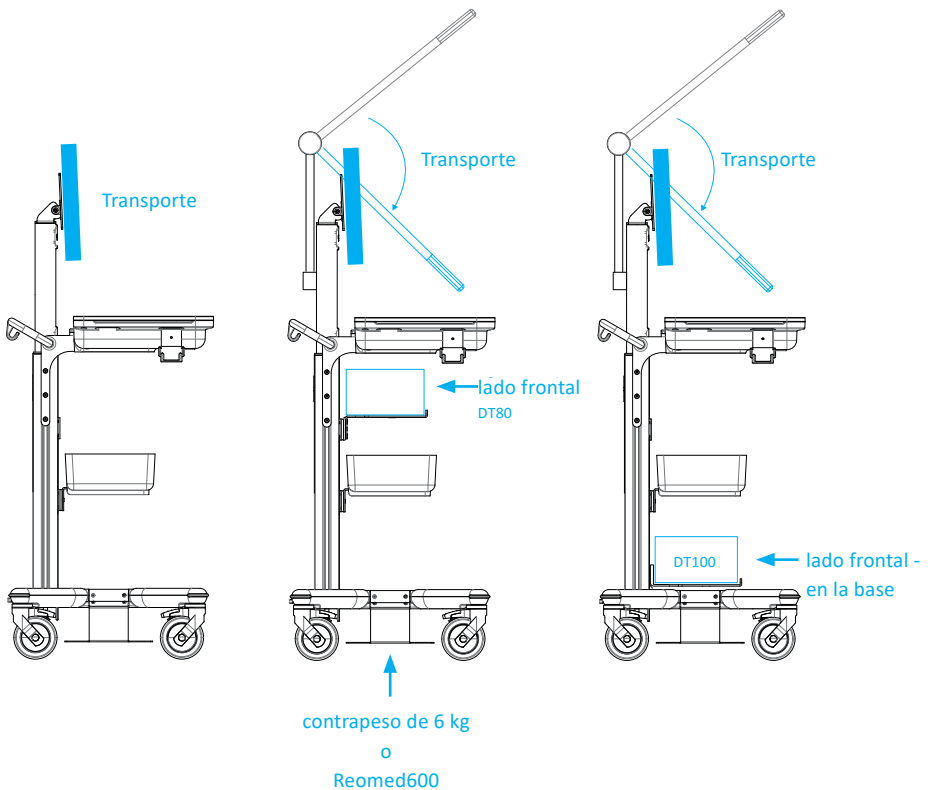

Distribuido por: SCHILLER

Altgasse 68

Apartado postal 1052

6341 Baar

Suiza

www.schiller.ch



Multix Solutions s.r.l.

Via Padre Rovagnati 2

22066

Mariano Comense (CO)

Italia

