

Instruções de utilização



SCHILLER
The Art of Diagnostics



Scan the QR code to
find the instructions
in your language



Por favor forneça o instruções de utilização ao Utilizador final após a instalação.




Todos os acessórios devem ser montados antes da consola

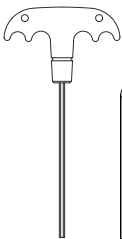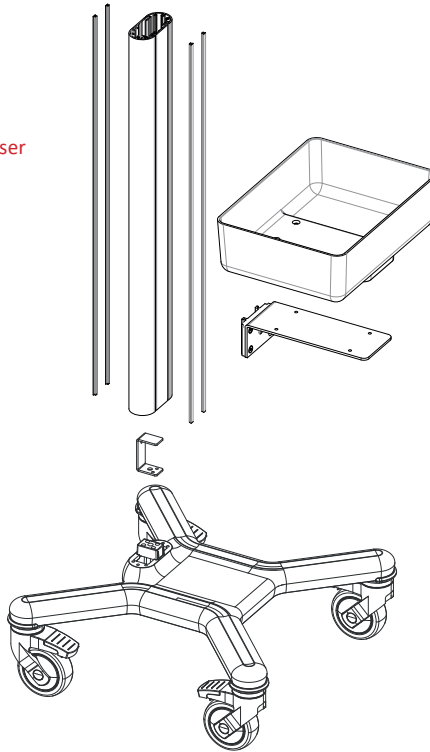


3




2.5

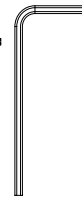

4

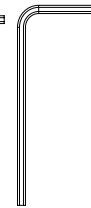

5

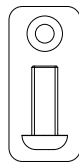

1x
M6X16+
plastic washer




4x
Ø4X38



4x
M6X8



4x
M4X6
(ilhós)

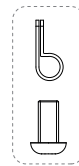

1x
M4X12
CBL
CLIP(base)



2x
M6x30
with
threadlocker

ILUSTRAÇÃO A


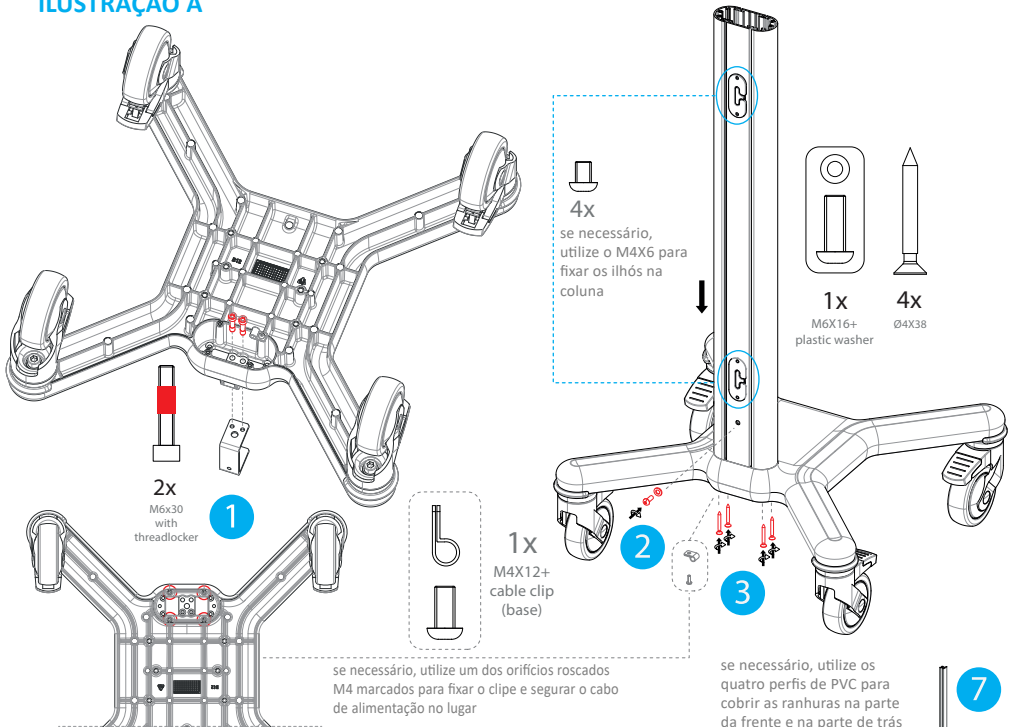


ILUSTRAÇÃO B



FINALIDADE

O Trolley X1 permite transportar o **aparelho SCHILLER ECG** e os seus acessórios entre os pontos de terapia no ambiente hospitalar e o ambiente limitado do centro de cuidados.

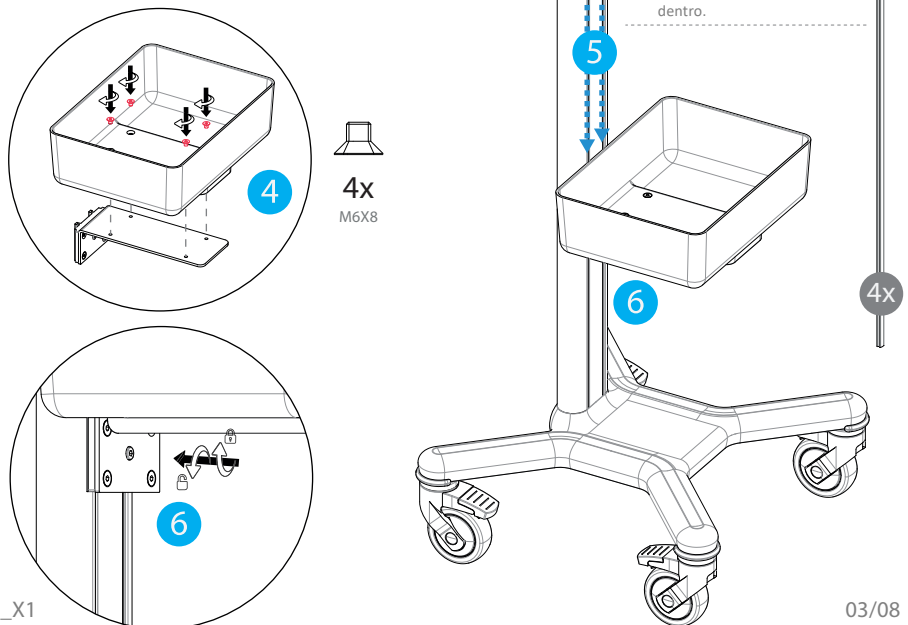

OBRIGAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Leia as instruções do Trolley antes de utilizar.
- Conserve as instruções para futuras consultas.
- O Produto foi criado exclusivamente para os métodos mencionados no manual de instruções.
- Qualquer outro tipo de utilização deve ser considerado impróprio.
- A Multix Solutions não é responsável por danos a pessoas e/ou coisas devido a utilização imprópria.
- A alteração ou danos causados pela utilização incorreta do produto leva à perda imediata da garantia.
- Quando um **aparelho SCHILLER ECG** é montado no trolley, caberá à **SCHILLER** assegurar que o sistema cumpra as atuais normas aplicáveis, EN 60601-1 versão atual

ADVERTÊNCIA E CUIDADO GERAIS

A segurança do trolley é garantida seguindo atentamente as instruções abaixo.

1. Certifique-se de que o trolley corresponda à ilustração do manual.
 - Verifique se não foi partido ou danificado durante o transporte.
 - Verifique se as partes móveis e de bloqueio como rodas, travões e (se houver) a mola a gás estão a funcionar.
 - Todas as quatro rodas do trolley devem ser bloqueadas, quando o sistema e os seus acessórios estiverem montados ou quando o sistema é aplicado parado.
 - Todas as rodas do Trolley devem ser desbloqueadas antes de o Trolley ser empurrado.
 - Certifique-se de que o Trolley esteja estacionado.
 - Certifique-se de que o Trolley não esteja estacionado em superfícies demasiado irregulares.
 - A fim de evitar que o carrinho tombe, quando o carrinho estiver a passar por cima de obstáculos (por exemplo, cabos eléctricos ou soleiras das portas), é necessário segurar a pega do carrinho, virar 180° e puxar o carrinho como ilustrado na figura 02 das instruções de transporte na página 06. Se houver a presença do braço articulado, feche-o antes de mover o trólei.
 - Evite aplicar uma força excessiva para empurrar o Trolley.
 - Não são permitidas alterações neste produto.
2. Respeite o peso máximo de carga indicado na etiqueta de carga.
 - É PROIBIDO SENTAR NO CARRINHO
 - PROIBIDO EMPURRAR
3. A instalação e manutenção devem ser efetuadas por pessoal técnico qualificado e seguindo as instruções de montagem.
4. A pedido, é possível fornecer peças sobressalentes após a aprovação da **SCHILLER**.

MONTAGEM

A guia de instalação do Trolley está descrita nas ilustrações a-b na página 3.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Verifique todos os pontos e mecanismos de fixação de 6 em 6 meses.
- O produto é destinado apenas para utilização em ambientes internos.
- Limpe regularmente as superfícies de metal e/ou plástico com detergentes não corrosivos de pH neutro e um pano/esponja/escova com cerdas macias.
- Não deite diretamente sobre as superfícies líquidos, detergentes à base de cloro ou amónia, substâncias gordurosas e oleosas.

ELIMINAÇÃO

- A duração do produto é de 10 anos, após esta vida útil, o trolley deve ser eliminado de acordo com os regulamentos em vigor nos respetivos países.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Os seguintes símbolos são mostrados no produto ou nas instruções:



Cuidado



Siga as instruções de funcionamento



Dispositivo médico



Limitação de humidade



Manter seco



é proibido sentar no carrinho



Marca - CE



Fabricante



Número de lote



Orientação



Keep away from sunlight



proibido empurrar



Número de catálogo



Código do Produto



Data de fabrico



Frágil, manusear com cuidado



Limitação de temperatura



Distribuidor


ATENÇÃO



5 kg Carga máxima (cesto)
(11 Lb)



Massa total incluindo carga segura de trabalho, juntamente com o sistema de eléctrodo de sucção DT80 ou DT100 Strassle (* incluindo braço da bomba)

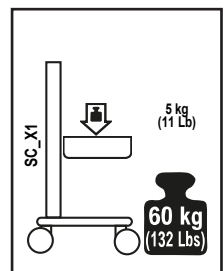

O trolley foi testado apenas com:

- * bomba strassle - DT80 montada na coluna da frente com 6kg de contrapeso *sob a base*
- * bomba strassle - DT100 montada na coluna da frente *na base*

Durante o transporte do trolley, o braço da bomba deve ser posicionado como mostra a imagem abaixo.

- ⚠ Se as bombas estiverem presentes, rodar para a frente e dobrar o braço durante o transporte.
Quando o carrinho estiver a passar sobre obstáculos, virar 180°, levantar ligeiramente o carrinho para cima, e puxar o carrinho.

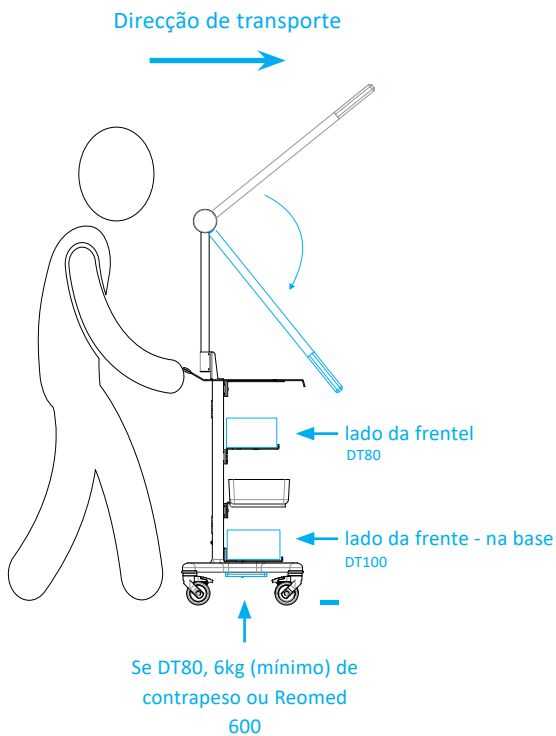


FIGURA 01

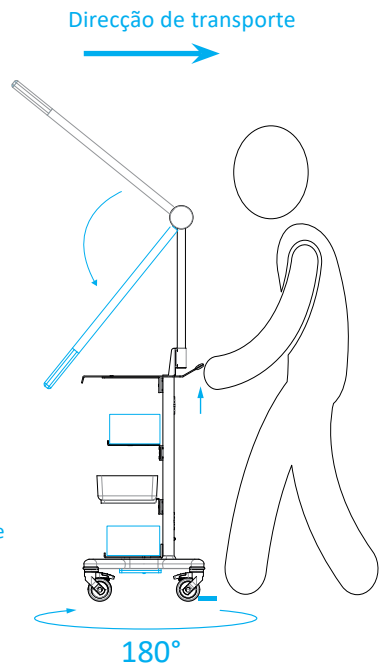


FIGURA 02

Distribuído por: SCHILLER AG

Altgasse 68

P.O. Box 1052

6341 Baar

Swiss

www.schiller.ch



Multix Solutions s.r.l.

Via Padre Rovagnati 2

22066

Mariano Comense (CO)

Itália

