

KÄYTTÖOHJEET


X1 TALL TROLLEY

MX.0001.800



Toimita käyttöohjeet loppukäyttäjälle
asennuksen jälkeen.


Asennus ja huolto on annettava ammattitaitoisen teknisen henkilökunnan tehtäväksi tämän käyttöoppaan kokoonpano- ja huolto- ohjeita noudattaen (ks. tämän käyttöoppaan omat kohdat "Kokoonpano" ja "Huolto").

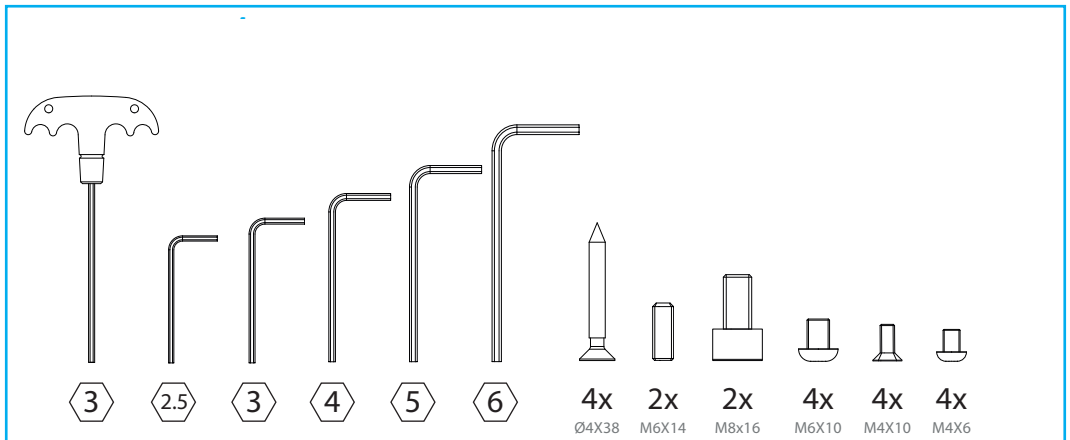



KOKOONPANO-OHJEET

- ! Jos mukana on lisävarusteita, tutustu niihin liittyviin ohjeisiin ennen vaunun
• kokoamista

1

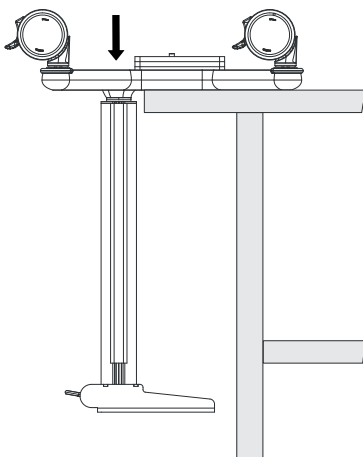


2

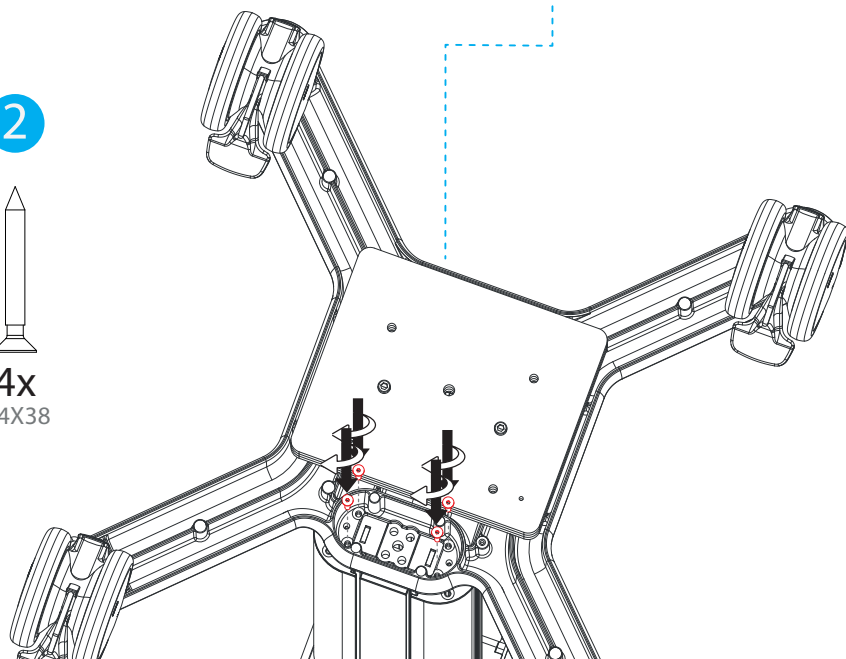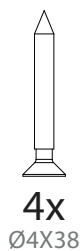


3

2x M6X14
2x M8x16

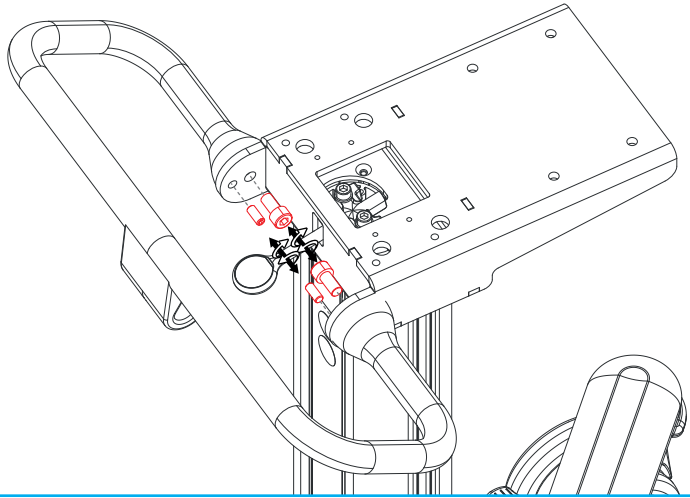


4

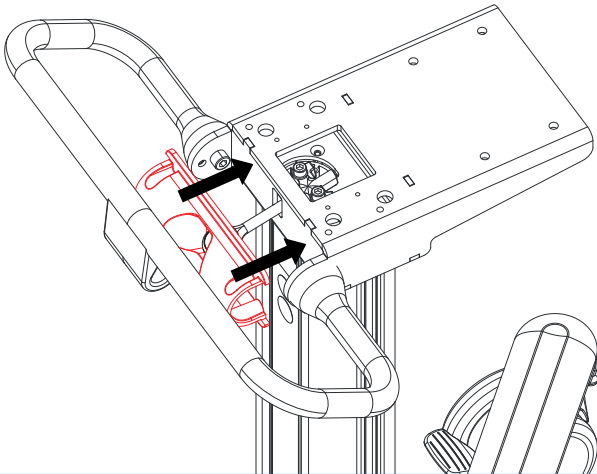


5


4x
M4X10

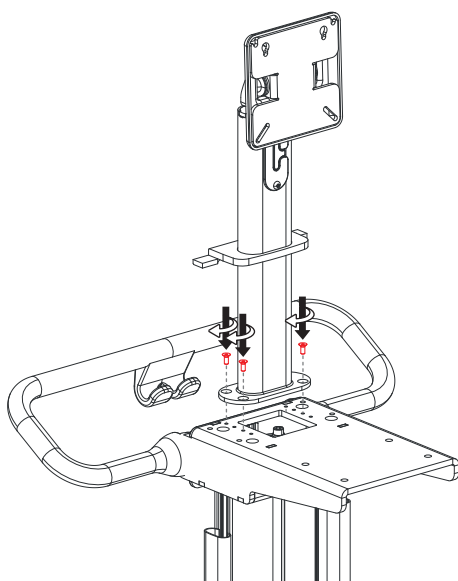


6

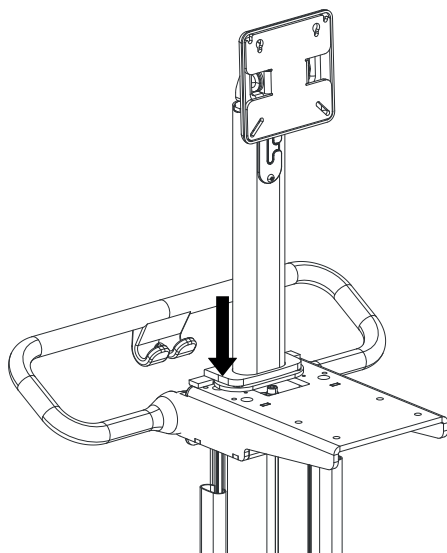

7




4x
M6X10




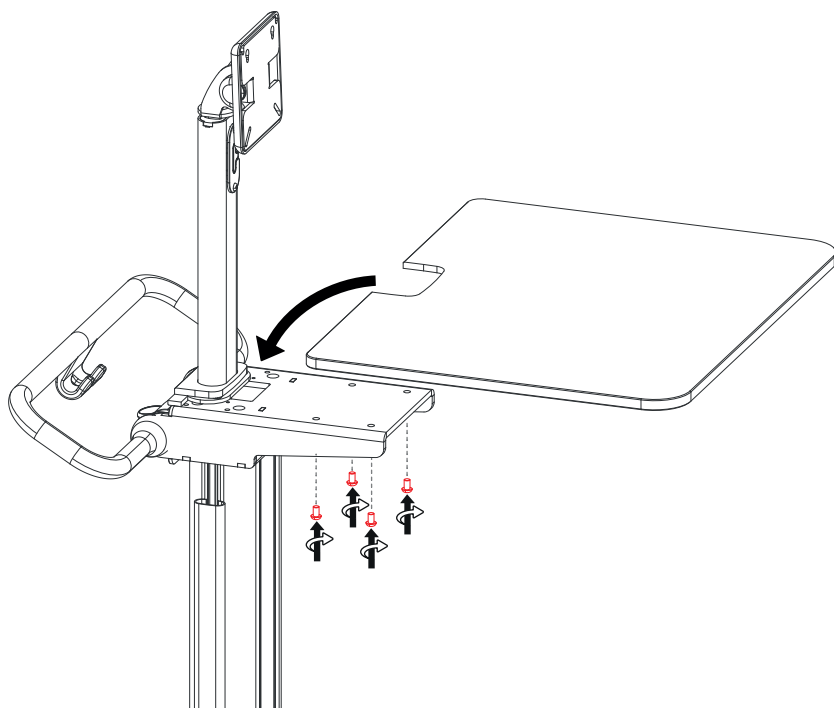


8




2x
M4X6

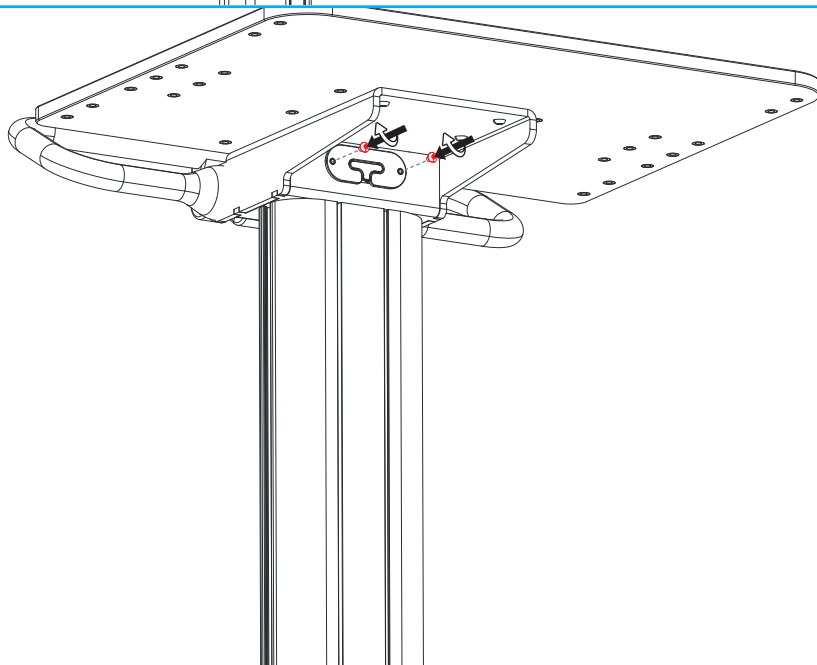

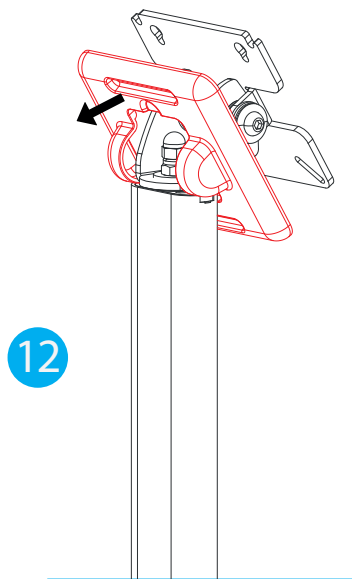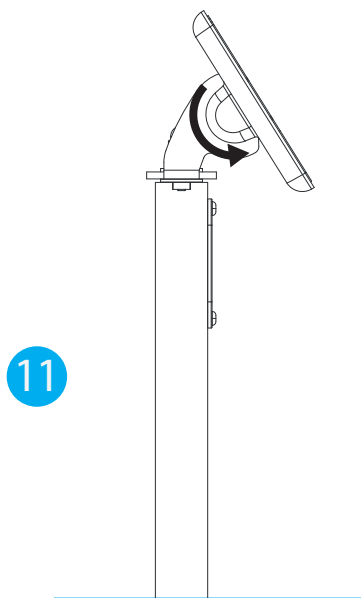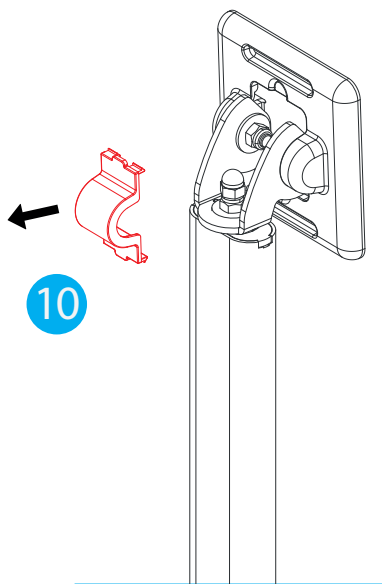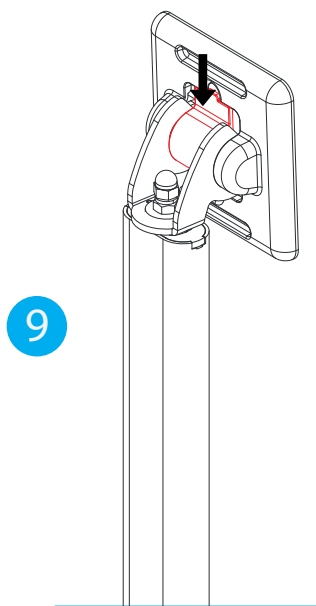


KOKOONPANO-OHJEET 032MLTACC - SHELF

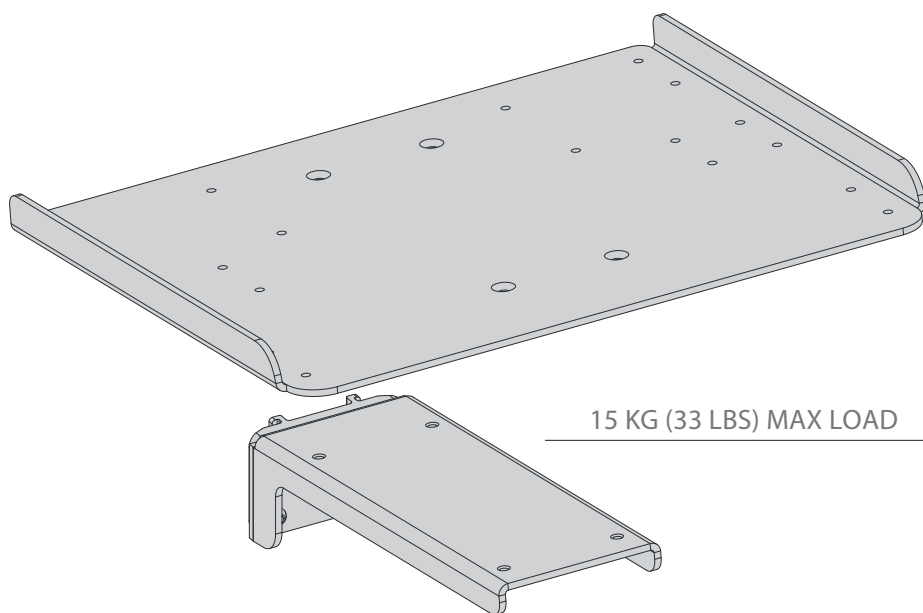

15 KG (33 LBS) MAX LOAD




4x
M6X8

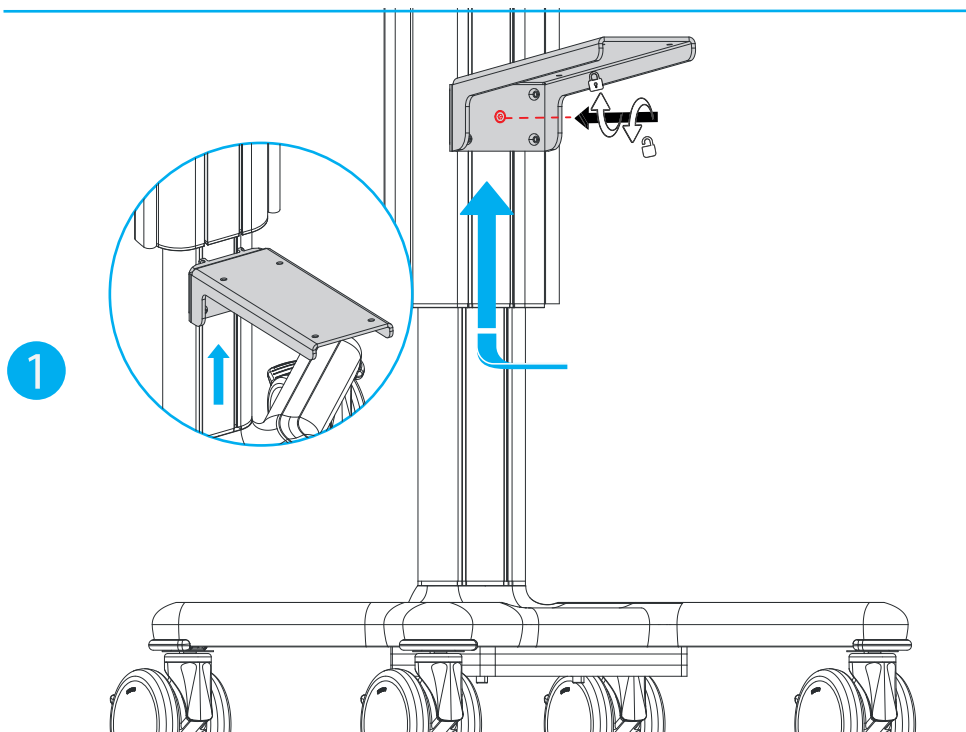


2



4x
M6X8

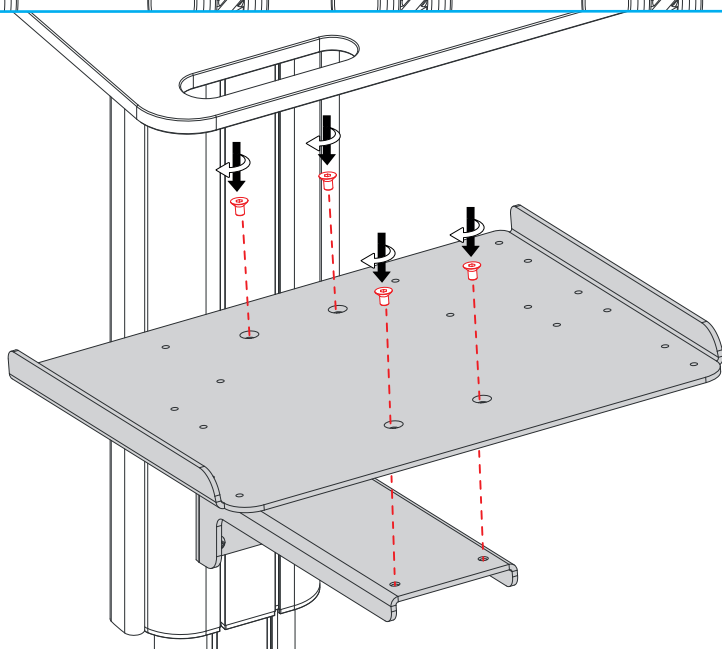

KOKOONPANO-OHJEET 025MLTACC - QWERTY SUPPORT

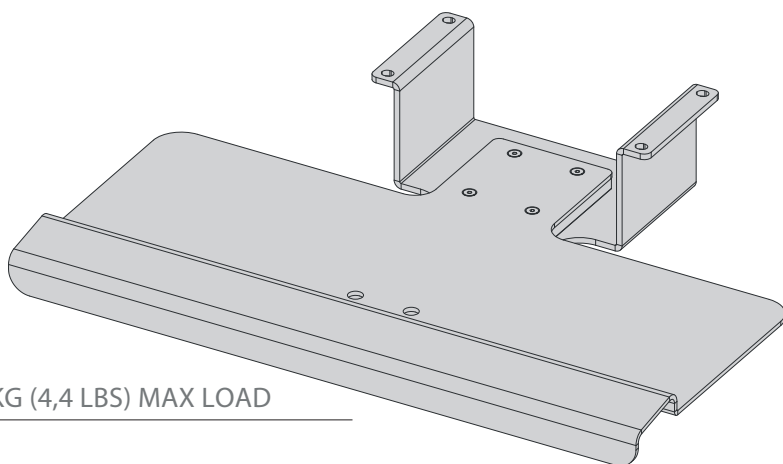

2 KG (4,4 LBS) MAX LOAD




4x


M6X8

1



4x
M6X8

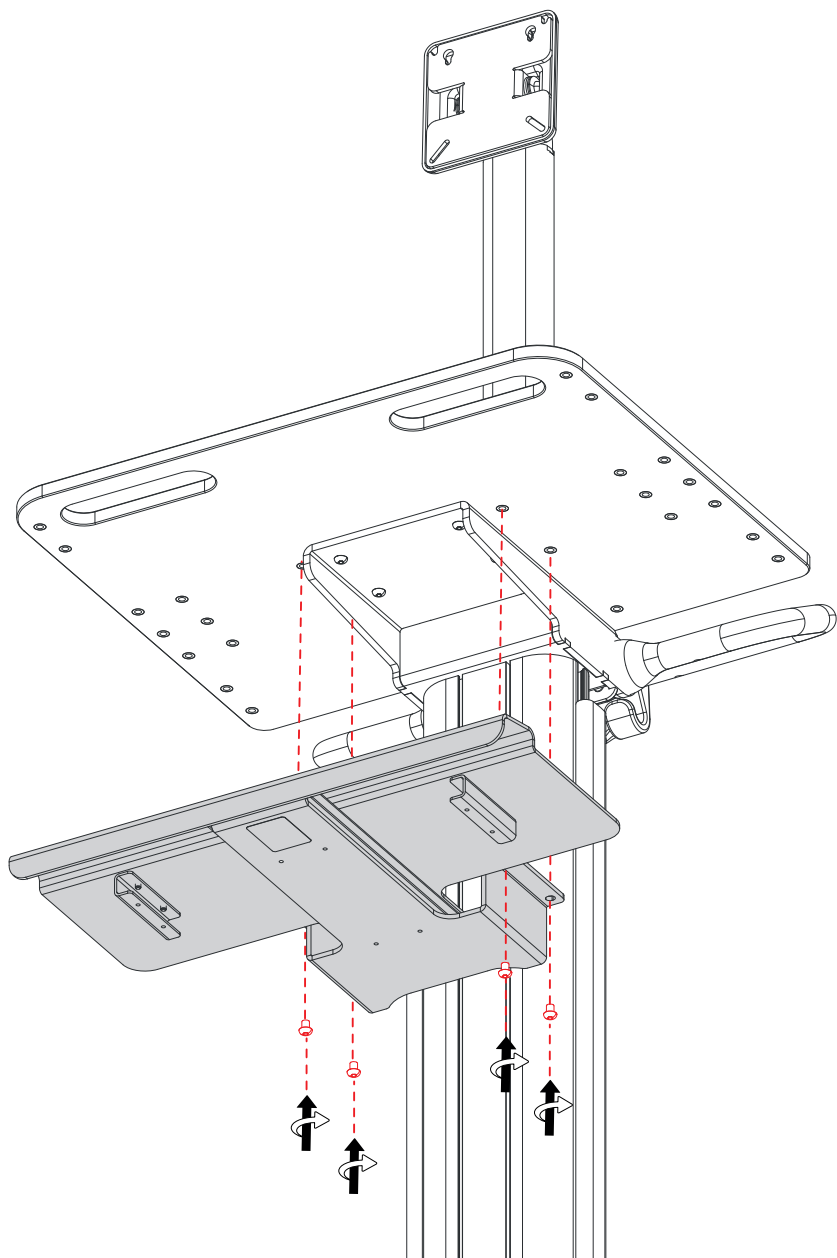

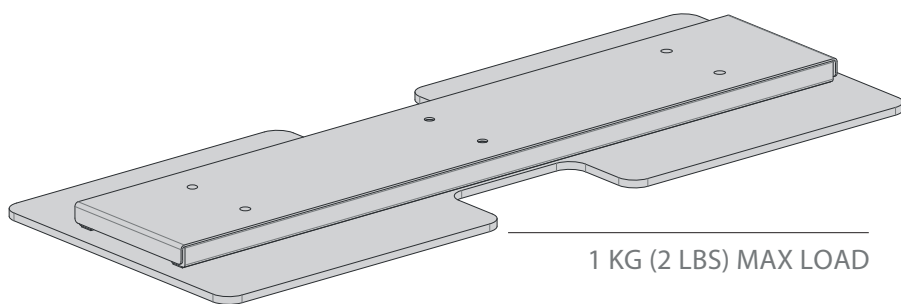


4x
M4X8

1




2x
M4X8

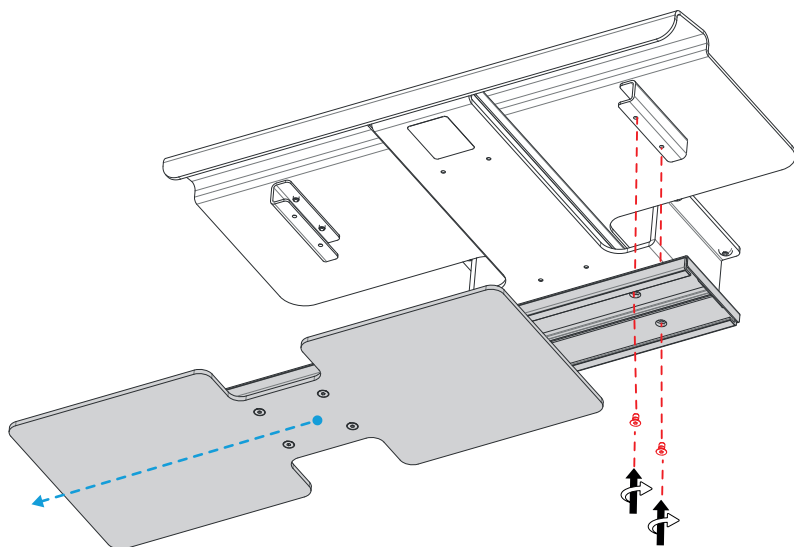

2



2x
M4X8

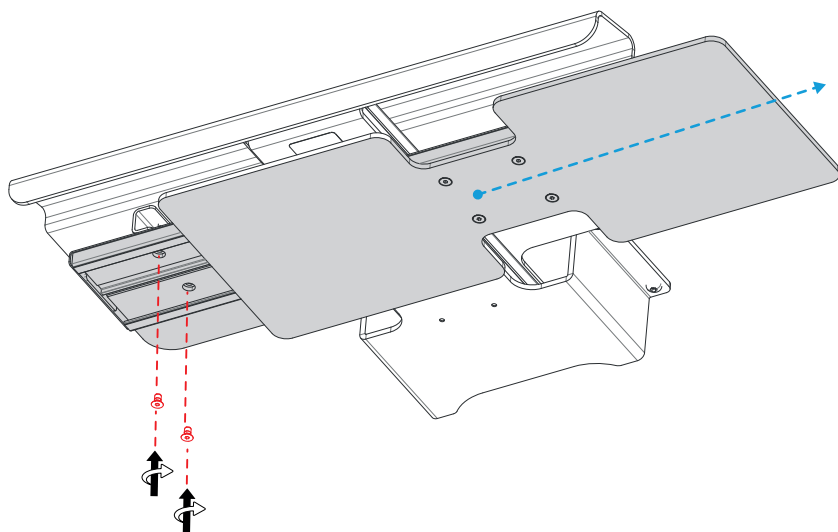

Tärkeitä huomautuksia



Asennus ja huolto on annettava ammattitaitoisen teknisen henkilökunnan tehtäväksi tämän käyttöoppaan kokoonpano- ja huolto- ohjeita noudattaen (ks. tämän käyttöoppaan omat kohdat "Kokoonpano" ja "Huolto").

TAVOITTEELLINEN KÄYTTÖ

Trolley X1 TALL mahdollistaa **laitteen ja sen lisävarusteiden** kuljettamisen hoitopaikkojen välillä sairaalaympäristössä ja rajoitetun hoidon laitospäristössä.

YLEISET TURVALLISUUSVELVOITTEET

- Vaunun käyttöohjeet on luettava ennen käyttöä.
- Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.
- Tuote on luotu yksinomaan käyttöohjeessa mainittuja menetelmiä varten. Muuta käyttöä on pidettävä sopimattomana.
- Jos kärryä peukaloidaan tai se vahingoittuu vääränlaisen käytön seurauksena, takuu raukeaa välittömästi.
- Multix Solutions ei ole vastuussa henkilö- ja/tai esinevahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä.
- Kun **laite** asennetaan vaunuun, **järjestelmän asentajan** vastuulla on varmistaa, että järjestelmä on voimassa olevien standardien EN 60601-1 nykyisen version mukainen.



YLEINEN VAROITUS JA VAROITUS

Kärryn turvallisuus taataan noudattamalla huolellisesti alla olevia varoituksia:

- Varmista, että kärry vastaa käyttöohjeen kuvaa.
- Tarkista, ettei se ole rikkoutunut tai vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Tarkista, että liikkuvat ja lukittavat osat, kuten pyörät, jarrut ja (jos on) kaasujousi, toimivat.
- Kaikkien kärryn neljän pyörän on oltava lukittuina, kun järjestelmä ja sen lisävarusteet on koottu.
- Kun kärryä ei ajeta, varmista, että kärryn pyörät on lukittu ja että järjestelmää ei ole pysäköity epätasaiselle alustalle.
- Kärryn kaikkien pyörien on oltava lukitsematta ennen kärryn työntämistä.
- Jotta kärry ei kaatuisi, kahvasta on pidettävä kiinni, jos kärryllä ajetaan esteiden yli (esimerkiksi virtajohtojen yli).
- Vältä liiallista voimankäyttöä työntäessäsi kärryä.
- Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.




LATAUSOHJEET

- KÄRRYILLÄ ISTUMINEN ON KIELLETTY.
- TYÖNTÄMINEN KIELLETTY, KUN PYÖRÄT OVAT TUKOSSA
- Noudata kohdassa "Kuljetusasento ja -suunta" ilmoitettuja enimmäiskuormia
- Varmista, että asennetun kokoonpanon kokonaispaino (lisävarusteet mukaan luettuina) ei ylitä kärryyn kiinnitetyssä tarrassa ja seuraavalla sivulla ilmoitettua kokonaispainoa.

KULJETUSASENTO JA -SUUNTA

Kuljetuksen aikana vaunu on laskettava alas kaasujousen päähän asti, pitäen kahvan kulkua eteenpäin, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty:

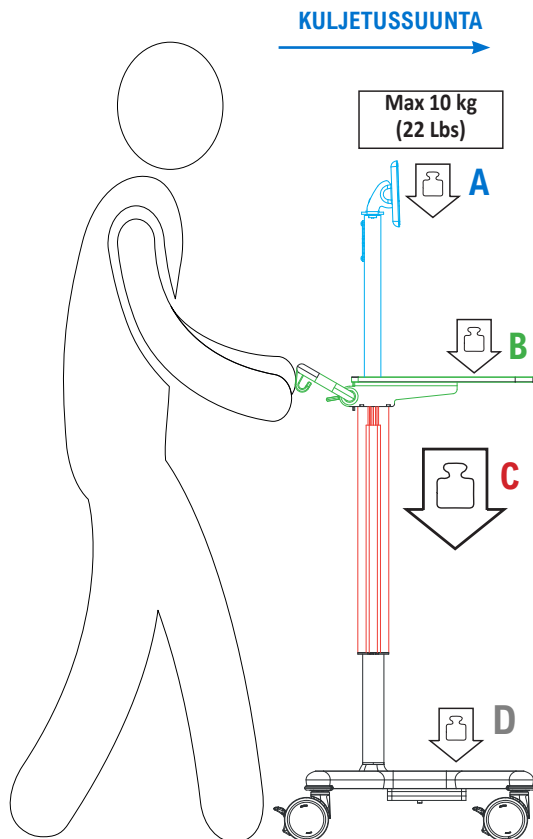

Maksimikuorma

A+B+C

20	200N Max load 17kg (37.4 Lbs)
30	300N Max load 26kg (57.3 Lbs)
40	400N Max load 35kg (77 Lbs)



ASENNETUN KOKOONPANOON
ENIMMÄISKOKONAISPAINO
(= vaunu + lisävarusteet +
turvallinen työkuorma)

Kokonaispaino = 80kg (176.37 Lbs) = A+B+C+D + kärryn paino

Kärryn paino = 29kg (63.9 Lbs)

Maksimikuorma (A+B+C) = 35 kg (77 Lbs)

Maksimikuorma D = 16 kg (35.2 Lbs) = 80kg - kärryn paino (29kg) - (A+B+C)*

*Jos vaunun liikkuvaan osaan (A + B + C) kohdistuvat kuormat eivät yllä ilmoitettua enimmäiskuormitukseen, vaunun kiinteään osaan (D) on mahdollista kohdistaa ilmoitettua suurempia kuormia ylittämättä enimmäiskokonaispainoa.



Asennus ja huolto on annettava ammattitaitoisen teknisen henkilökunnan tehtäväksi tämän käyttöoppaan kokoonpano- ja huolto- ohjeita noudattaen (ks. tämän käyttöoppaan omat kohdat “Kokoonpano” ja “Huolto”).

HUOLTO

Tarkasta kaikki kiinnityspisteet ja mekanismit 6 kuukauden välein.

Tuote soveltuu vain sisätiloissa käytettäväksi.

PUHDISTUS

Varmista, että tuote on puhdistettu ja desinfioitu käyttövaatimusten mukaisesti ennen käyttöä.

Puhdista metalli- ja/tai muovipinnat säännöllisesti syövyttämättömillä neutraalin pH:n pesuaineilla ja pehmeäharjaisella liinalla/sienellä/harjalla.

Älä kaada suoraan pinnoille nestemäisiä, klooripohjaisia tai ammoniakkipohjaisia pesuaineita, rasvaisia ja öljyisiä aineita.

VARAOSAT

Varaosa saa laitteen jälleenmyyjältä (ks. kohta Yhteystiedot).

KÄYTTÖIKÄ JA HÄVITTÄMINEN

Tuotteen käyttöikä on 10 vuotta.

Kärry ja pakkaus on hävitettävä paikallisten tai kansallisten määräysten mukaisesti.

Kartonová krabice a vnitřní výtuh	vnitřní obal
	
KARTONOVÁ DESKA	POLYETHYLEN S NÍZKOU HUSTOTOU

SYMBOLIEN SANASTO

Na vozíku nebo v návodu jsou uvedeny následující symboly:



Предпазливост



Toiminnan ohje



Medical-laite



Kosteuden rajoitus



Pidä kuivana



Kärryssä ei saa istua



kokonaispaino



CE-merkintä



valmistaja



Batch-koodi



Suunnistus



Pysy poissa auringonvalosta



Työntäminen kielletty



Yksilöllinen laitetunniste



Luettelon numero



Tuotenumero



Valmistuspäivä



Hauras, käsittele huolellisesti



Lämpötilan raja-arvo



Jakanut



Maksimikuorma

Jakelija: iTD GmbH



Jahnstrasse 1
84347 Pfarrkirchen
Germany
www.itd-cart.com
sales@itd-cart.com

Valmistanut: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

