

Manual de instrucțiuni



Vă rugăm să furnizați manualul de instrucțiuni utilizatorului final după instalare.




Instalarea și întreținerea trebuie efectuate de către personal tehnic calificat și în conformitate cu instrucțiunile de asamblare și întreținere (a se vedea secțiunea dedicată “Asamblare” și “Întreținere”) din acest manual.

Reproducerea, duplicarea sau traducerea, chiar și sub formă de extrase, sunt interzise fără acordul prealabil al Multix Solutions S.r.l.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE




Trolley X1T este un dispozitiv medical de clasa I conform regulilor de clasificare din anexa VIII și poartă marcajul „CE” în conformitate cu Regulamentul privind dispozitivele medicale (MDR) (UE) 2017/745. Este conform cu IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 și îndeplinește cerințele generale de siguranță și performanță din anexa I la Regulamentul privind dispozitivele medicale menționat anterior.

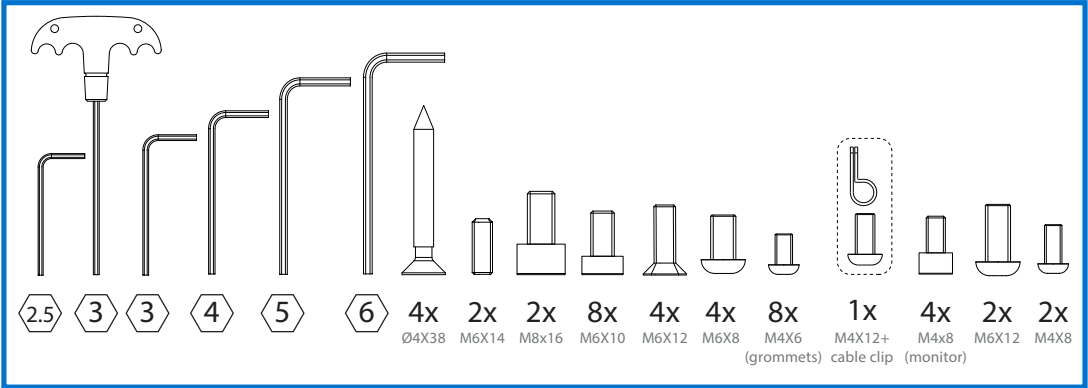

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

000CNSX1T - X1T TROLLEY

- ! Dacă sunt prezente accesorii, consultați instrucțiunile aferente înainte de
• asamblarea căruciorului

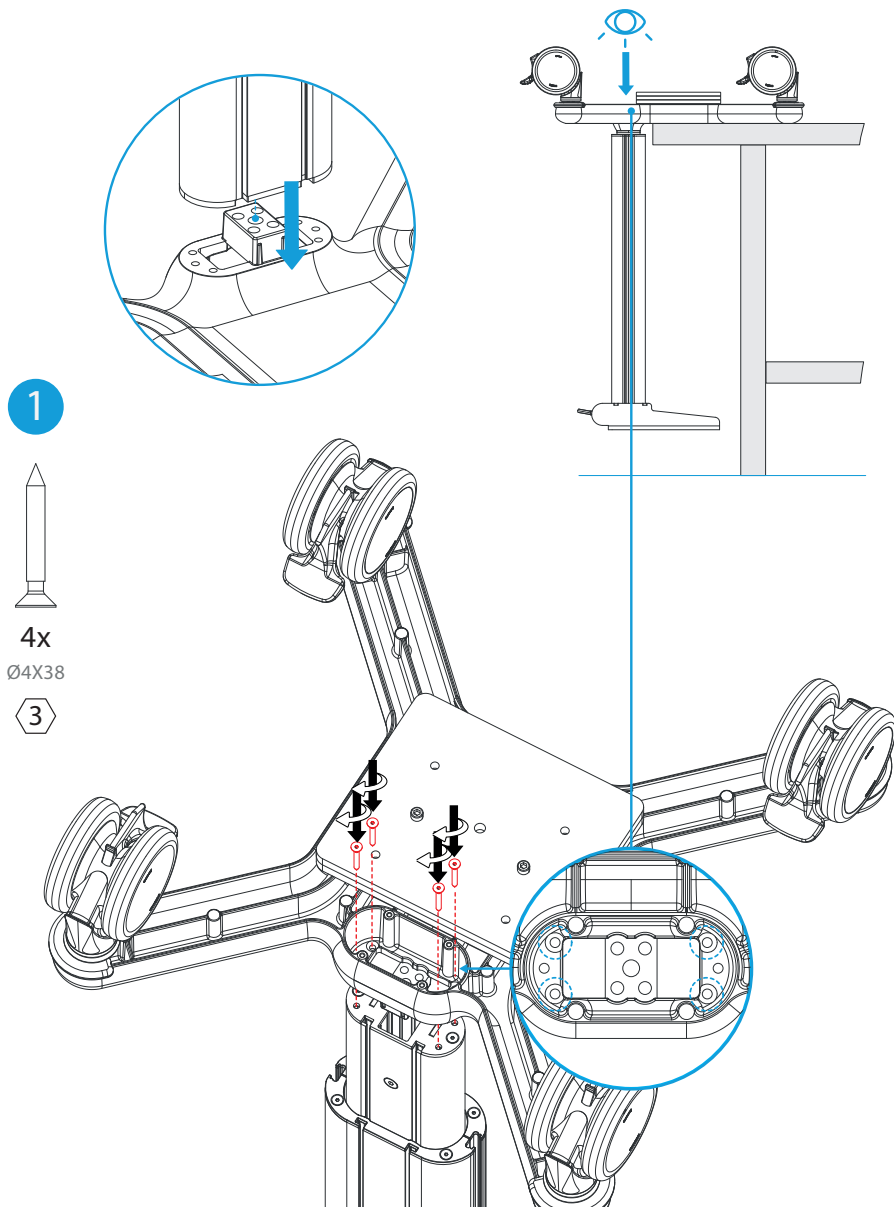

2



2x

M6X14


3




2x

M8x16


6

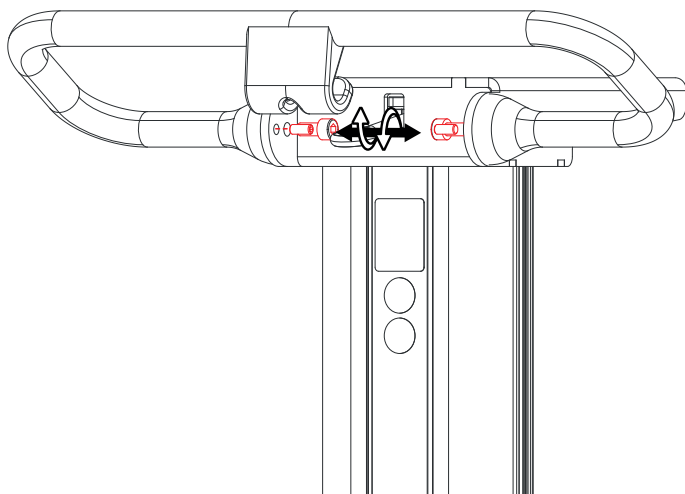


3

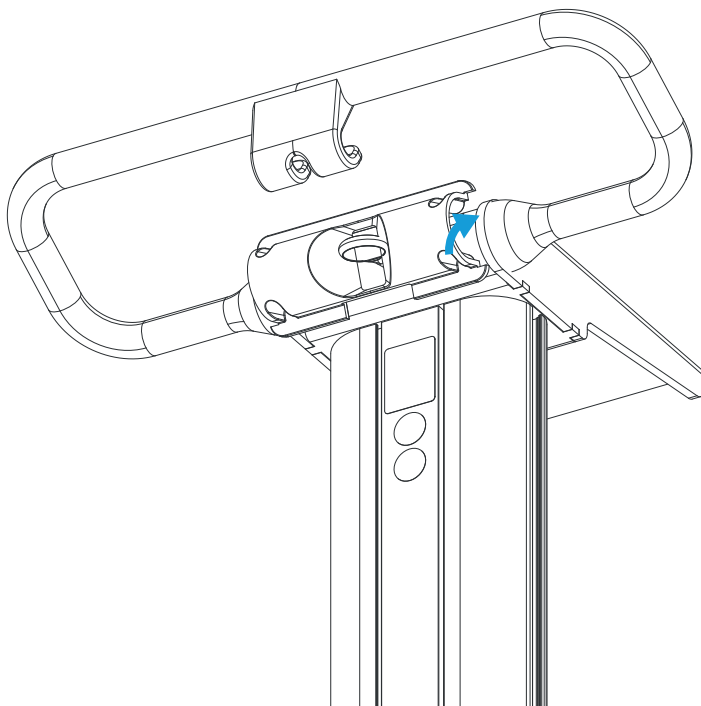

- 5
- 4x
M6x18
metal washer
- 5

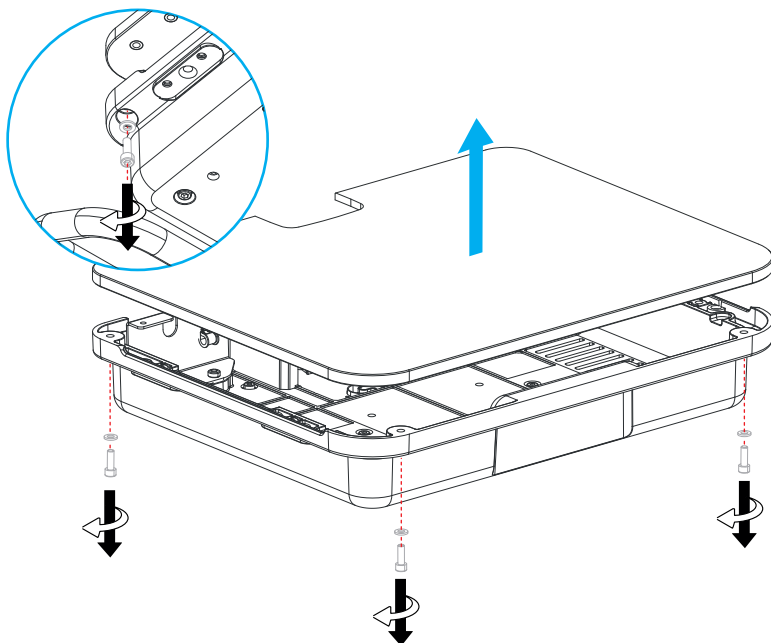

- 6
- 4x
M6x12
- 4

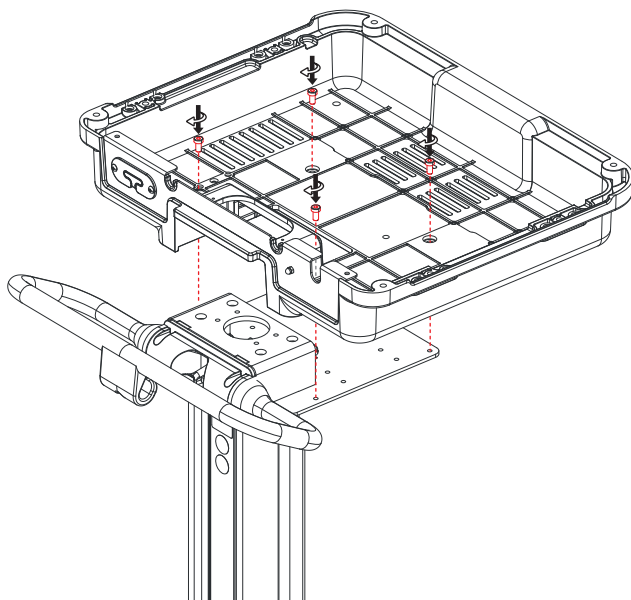


7



4x
M6x12

4

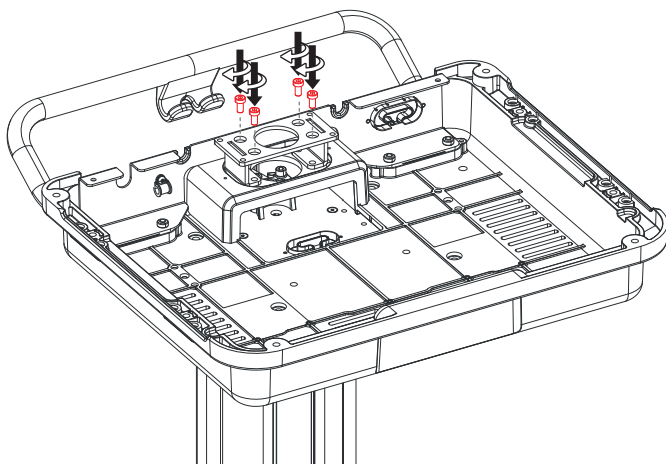


8




4x
M6x10

4

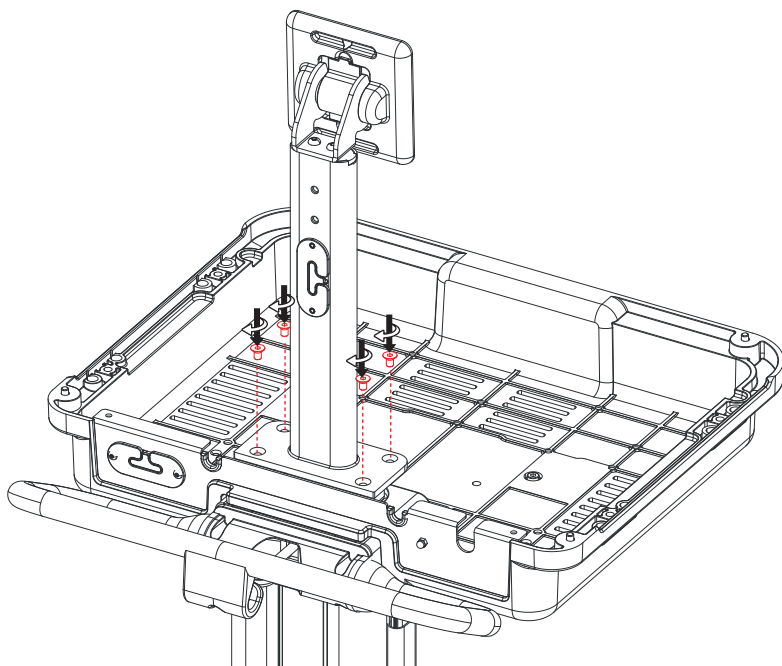


9

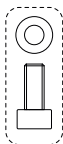

4x
M6x18
metal washer

5

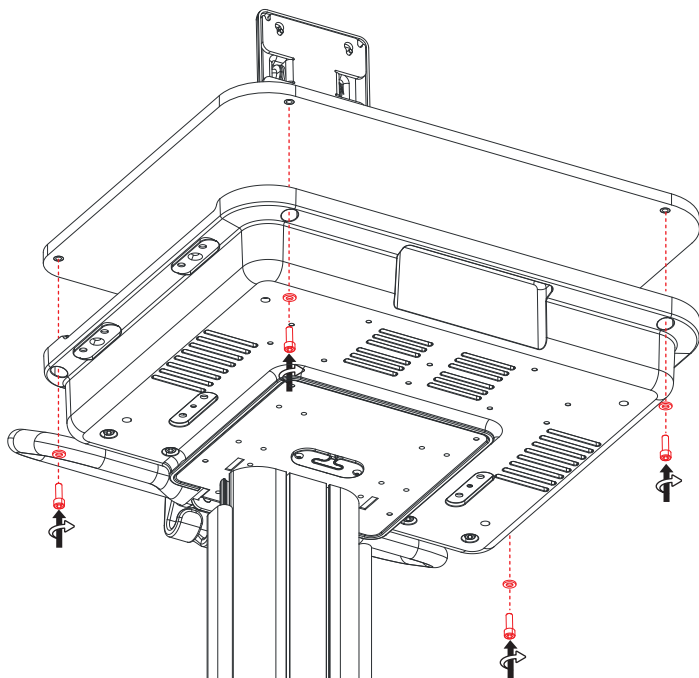



10



4x
M6X8

4

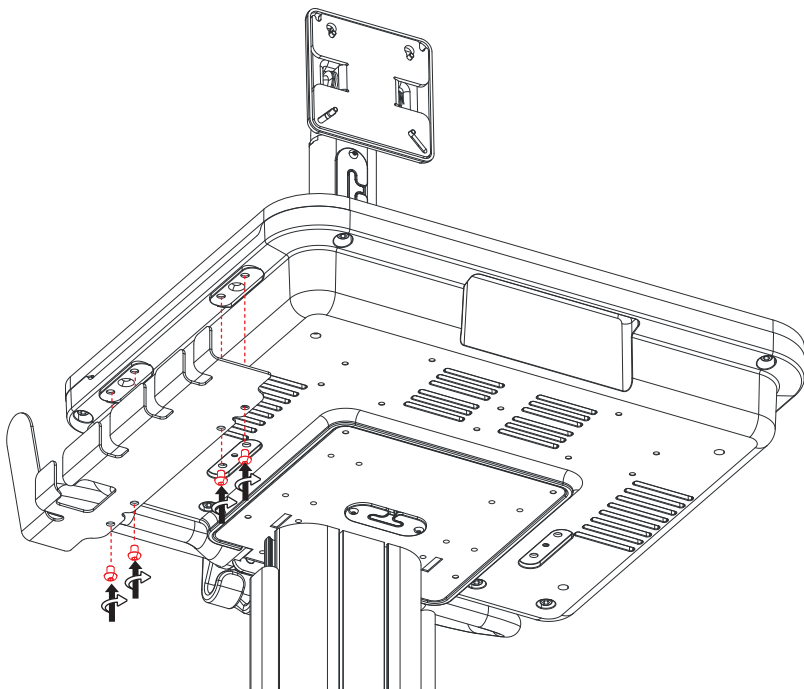

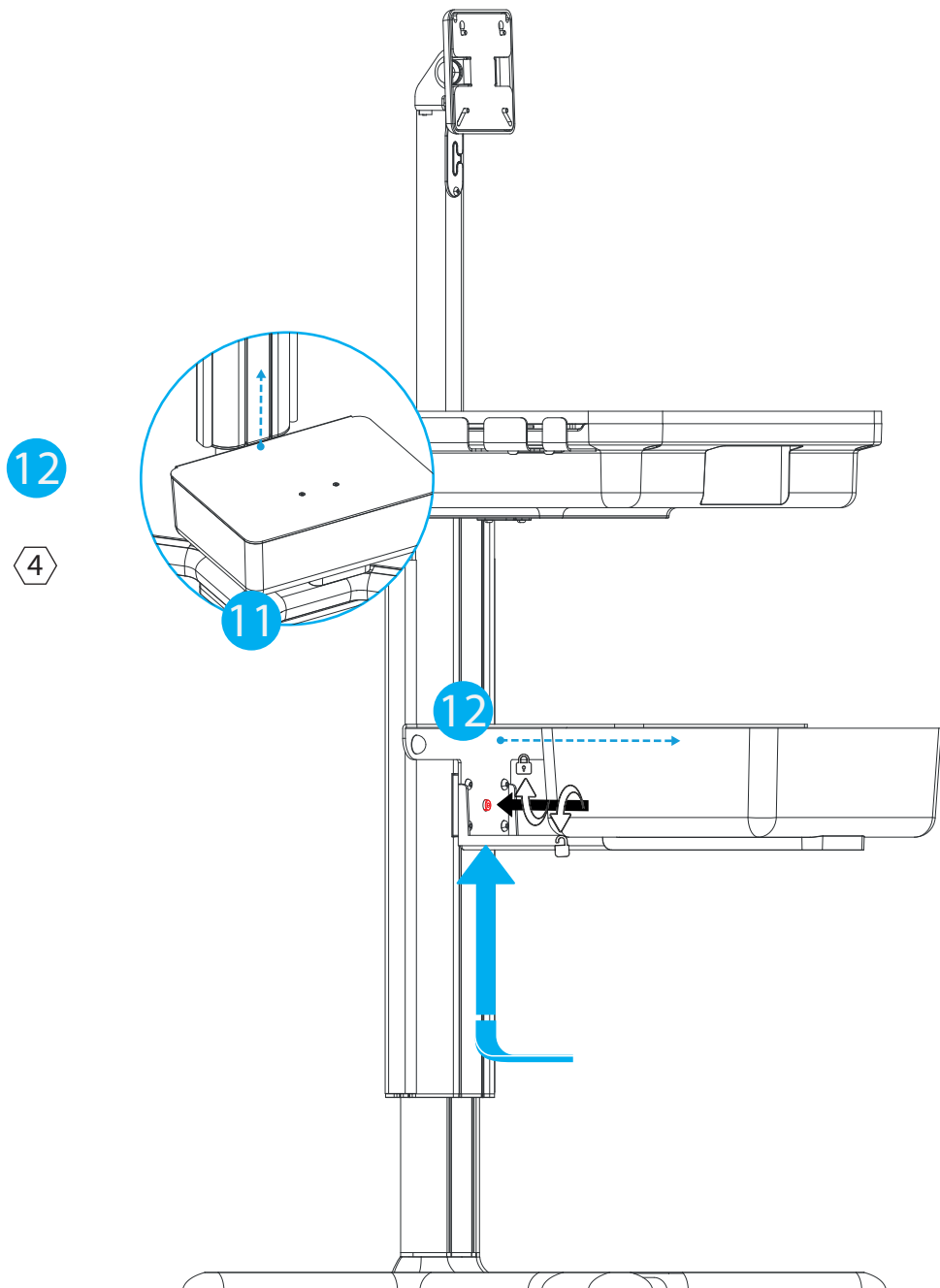


13




4x

M4X6

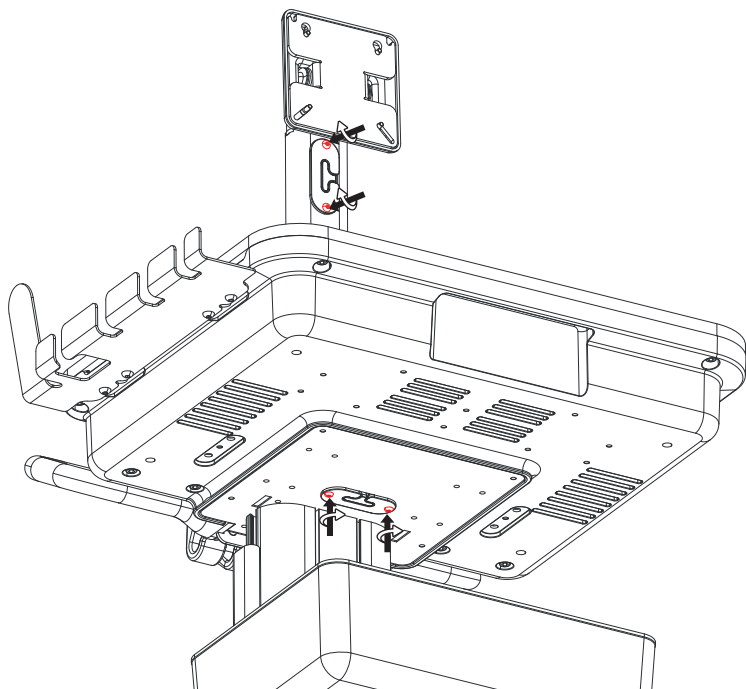


if needed, use the M4X6 to fix the grommets


14

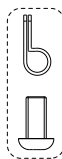

1x

M4X12+
cable clip

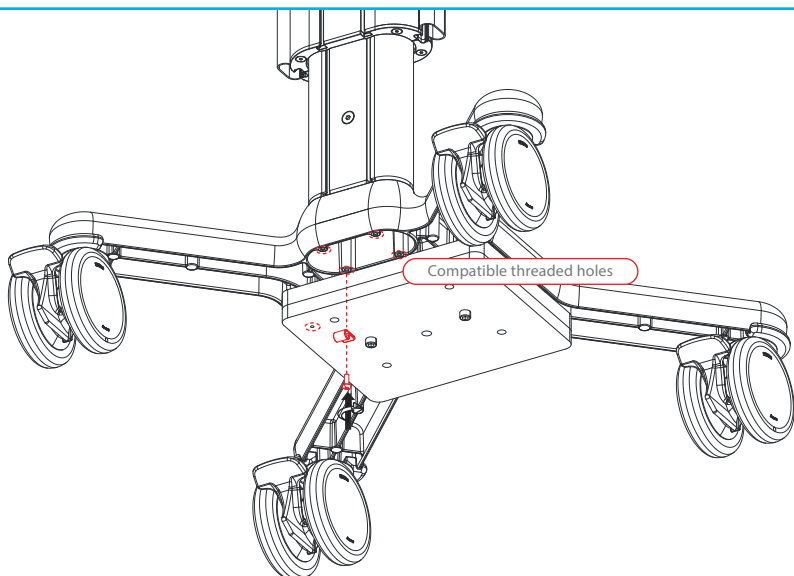

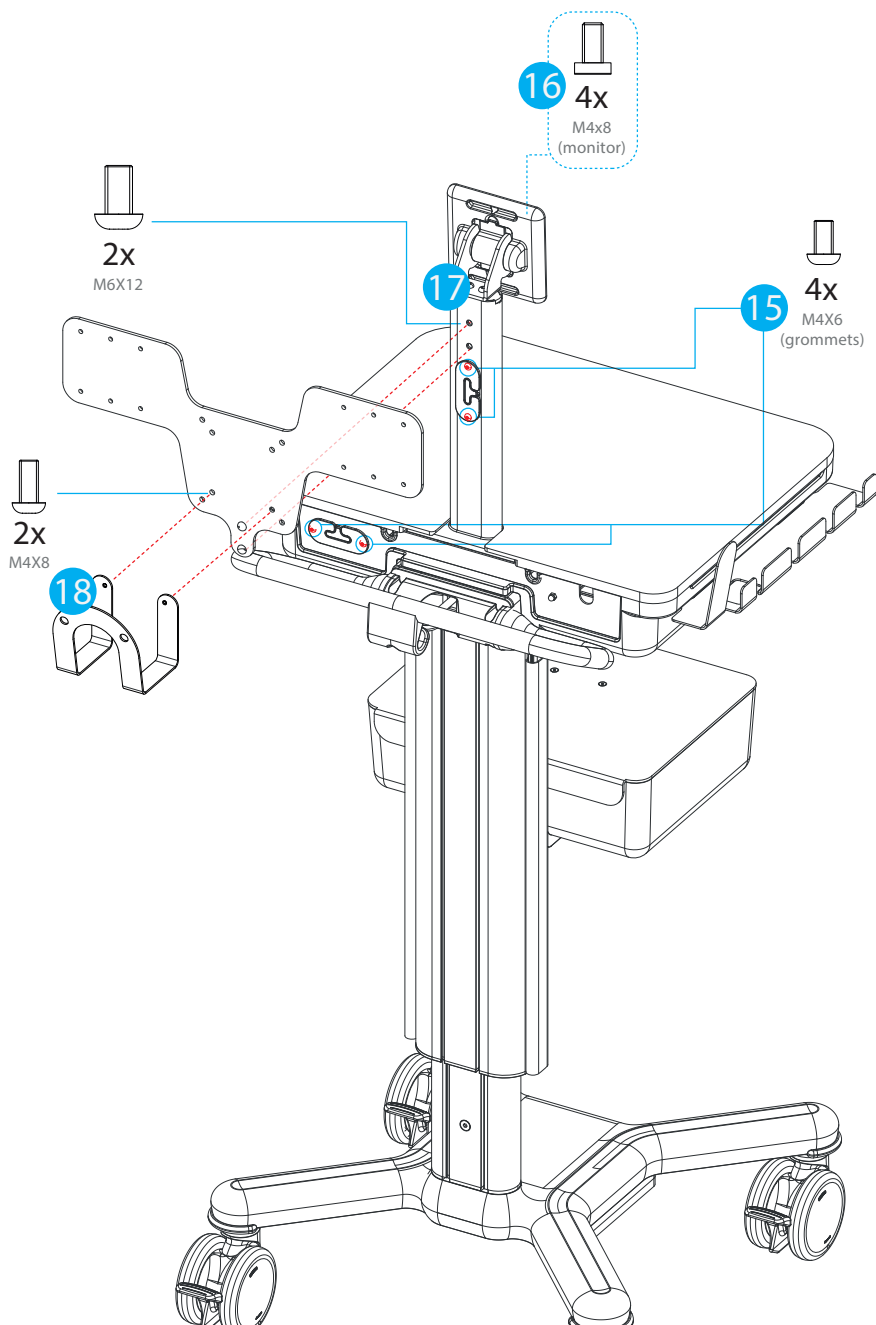

if needed, use the M4X6 to fix the grommets

Notificări importante



Instalarea și întreținerea trebuie efectuate de către personal tehnic calificat și în conformitate cu instrucțiunile de asamblare și întreținere (a se vedea secțiunea dedicată “Asamblare” și “Întreținere”) din acest manual.

UTILIZARE INTENȚIONATĂ

Căruciorul X1T - 000CNSX1T permite transportul **unui dispozitiv și al accesoriilor** sale între punctele de terapie din mediul spitalicesc și din mediul unităților de îngrijire limitată..

OBLIGAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Instrucțiunile căruciorului trebuie citite înainte de utilizare.
- Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
- Produsul a fost creat exclusiv pentru metodele menționate în manualul de instrucțiuni. Orice altă utilizare trebuie considerată necorespunzătoare.
- Manipularea sau deteriorarea cauzată de utilizarea incorectă a căruciorului duce la pierderea imediată a garanției.
- **Multix Solutions nu este răspunzătoare pentru daunele aduse persoanelor și/sau lucrurilor din cauza utilizării necorespunzătoare.**
- Atunci când un **dispozitiv** este montat pe cărucior, va fi responsabilitatea **instalatorului sistemului** să se asigure că sistemul respectă standardele actuale aplicabile, EN 60601-1 versiunea actuală.



AVERTISMENT GENERAL ȘI PRECAUȚII

Siguranța căruciorului este garantată prin respectarea cu atenție a avertismentelor de mai jos:

- Asigurați-vă că căruciorul corespunde ilustrației din manual.
- Verificați dacă nu este rupt sau deteriorat în timpul transportului.
- Verificați dacă părțile mobile și de blocare, cum ar fi roțile, frânele și (dacă există) arcul cu gaz, sunt funcționale.
- Toate cele patru roți ale căruciorului trebuie să fie blocate atunci când sistemul și accesoriile sale sunt asamblate.
- Când căruciorul nu este condus, asigurați-vă că roțile căruciorului sunt blocate și că sistemul nu este parcat pe suprafețe denivelate.
- Toate roțile căruciorului trebuie să fie deblocate înainte de a împinge căruciorul.
- Pentru a preveni răsturnarea căruciorului, mânerul trebuie ținut dacă căruciorul este condus peste obstacole (de exemplu, cabluri de alimentare).
- Evitați forța excesivă atunci când împingeți căruciorul.
- Nu sunt permise modificări ale acestui dispozitiv.




INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- **ESTE INTERZIS SĂ STAI PE CĂRUCIOR**
- **ÎMPINGEREA ESTE INTERZISĂ ATUNCI CÂND ROTILE SUNT BLOCATE**
- Respectați sarcinile maxime indicate în secțiunea “Poziția și direcția de transport”.
- **Asigurați-vă că greutatea totală a configurației montate (la care se adaugă accesoriile) nu depășește greutatea totală indicată pe eticheta aplicată pe cărucior și pe pagina următoare.**

Notificări importante

POZIȚIA ȘI DIRECȚIA DE TRANSPORT

În timpul transportului, căruciorul trebuie să fie coborât până la capătul arcului cu gaz, ținând mânerul cu fața în față, așa cum se arată în imaginea de mai jos:

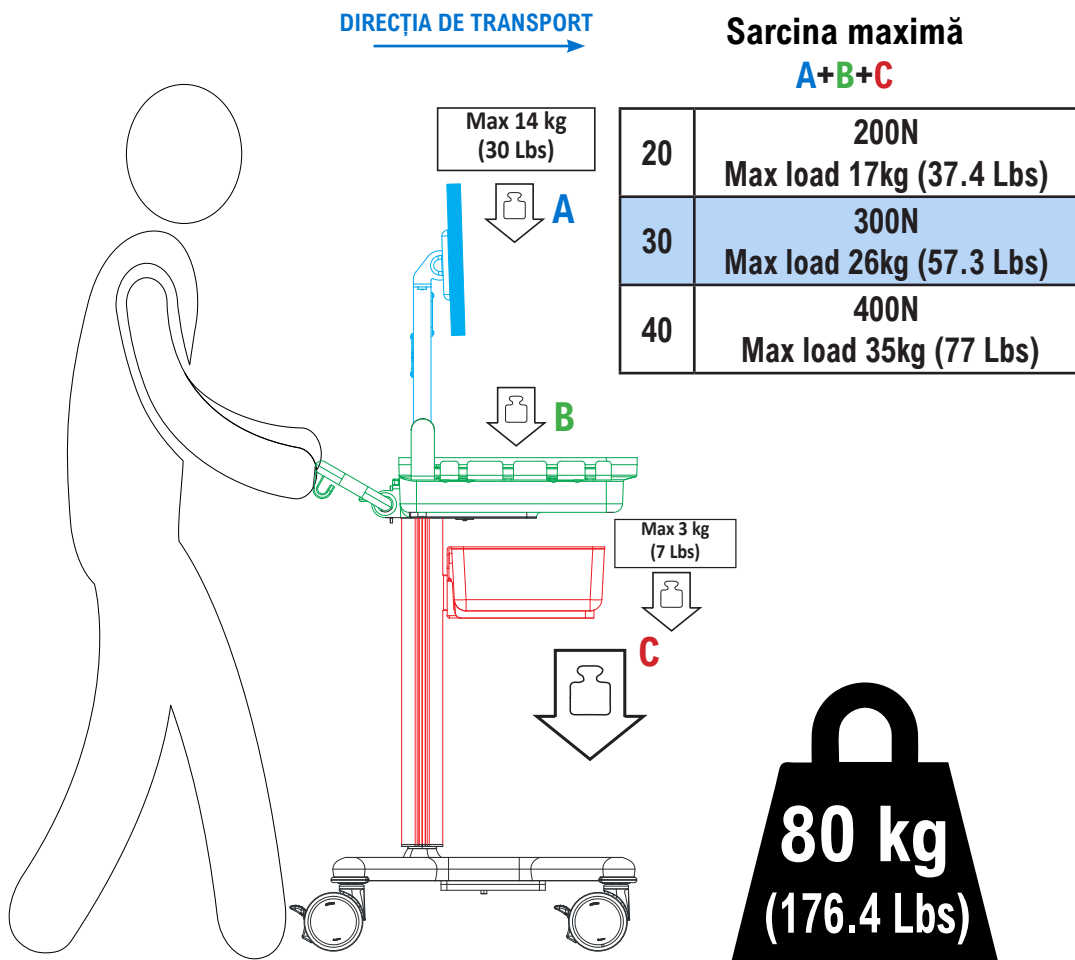

Anexa



Instalarea și întreținerea trebuie efectuate de către personal tehnic calificat și în conformitate cu instrucțiunile de asamblare și întreținere (a se vedea secțiunea dedicată “Asamblare” și “Întreținere”) din acest manual.

ÎNȚEȚINERE

Verificați toate punctele de fixare și mecanismele la fiecare 6 luni.

Produsul este adecvat numai pentru utilizarea în medii interioare.

CURĂȚARE

Curățați regulat suprafețele metalice și/sau din plastic cu detergenți necorozivi cu pH neutru și o cârpă/burete/perie cu peri moi.

Nu turnați direct pe suprafețe detergenți lichizi, pe bază de clor sau amoniac, substanțe grase și uleioase.

PIESE DE SCHIMB

Pentru piese de schimb, consultați distribuitorul dispozitivului (a se vedea secțiunea Contact).

DURATA DE VIAȚĂ ȘI ELIMINARE

Durata de viață a produsului este de 10 ani.

Căruciorul și ambalajul trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale sau naționale.

Cutie de carton și întărituri interne	Ambalaj intern
CARTON	POLIETILENĂ DE DENSITATE REDUSĂ

GLOSAR DE SIMBOLURI

Următoarele simboluri sunt indicate pe cărucior sau în instrucțiuni:



Prudență



Instrucțiuni de funcționare



Dispozitiv medical



Limitarea umidității



Păstrați uscat



Este interzis să stai pe cărucior



Masa totală



Marcajul CE



Producător



Codul Batch



Orientare



A se păstra departe de lumina soarelui



Împingerea interzisă



Numărul catalogului



Numărul produsului



Data fabricației



Fragil, mâner cu grijă



Limita de temperatură



Distribuit de

Distribuit de: CNSystems Medizintechnik GmbH



Reininghausstrasse 13
8020 Graz
Austria
www.cnsystems.com

Fabricat de: Multix Solutions s.r.l.



Via Padre Rovagnati 2
22066
Mariano Comense (CO)
Italy
www.multix-trolley.com

